




REACH

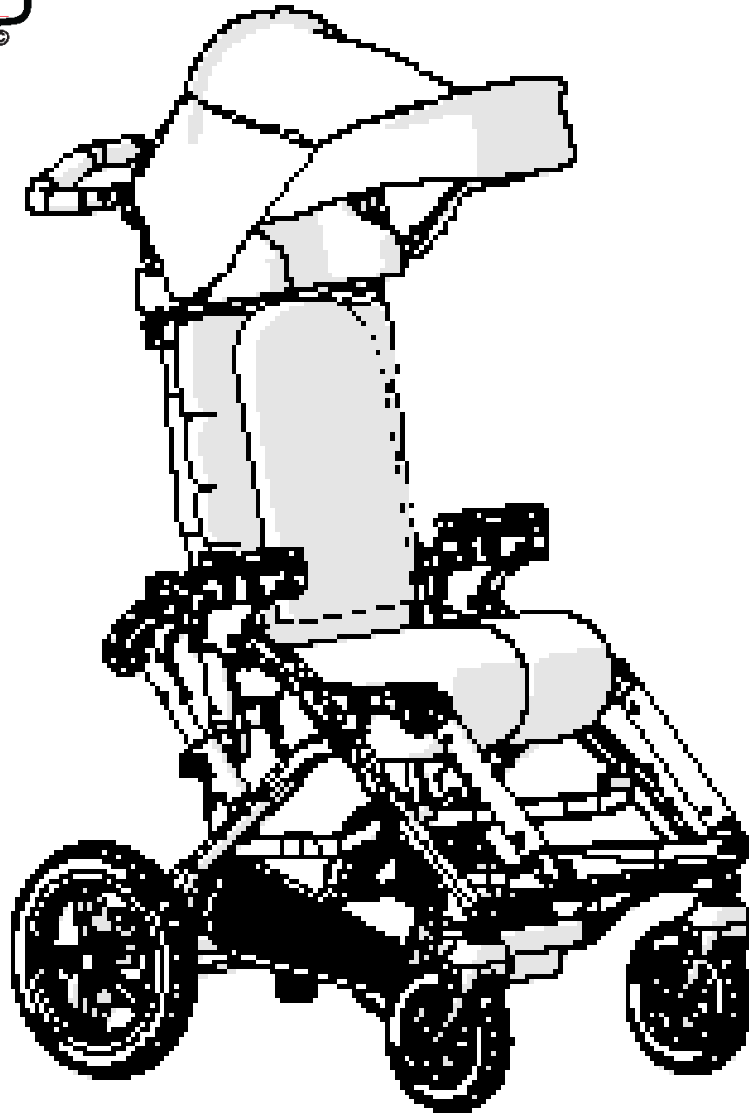

MANUAL DE USUARIO

PROVEEDOR: ESTE MANUAL DEBE DARSE AL USUARIO DE ESTA BASE DE MOVILIDAD DEPENDIENTE

USUARIO: LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTA BASE DE MOVILIDAD DEPENDIENTE Y GUARDE PARA FUTURA REFERENCIA

El producto entregado puede variar del descrito y representado en este manual.

Ha hecho una gran elección para su hijo al elegir una silla Leggero. Creemos que cada niño debe ser capaz de funcionar lo mejor que pueda. Agradecemos preguntas y comentarios sobre nuestros productos y servicios. Póngase en contacto con nosotros o con un proveedor autorizado utilizando la información a continuación.

Leggero
 174 D Shepherd Trail
 Bozeman, MT 59718
 Toll Free: 1-844-503-KIDS
 www.leggero.us

Proveedor Leggero Autorizado:

Nombre del proveedor	
Dirección	
Teléfono	
Email	
Website	

Representante Europeo autorizado:

EC	REP	MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany	CE
-----------	------------	---	-----------

Índice de contenidos

Sección 1: Introducción y características		Página
1.1	Introducción	4
1.2	Usuario de Reach	4
1.3	Asistente del usuario de Reach	4
1.4	Términos de garantía	4
1.5	Servicio y reparaciones	4
1.6	Características	5
1.7	Ajustabilidad y especificaciones	6
Sección 2: Advertencias		7
Sección 3: Desempacando su silla Reach		10
Sección 4: Operación y Ajuste		11
4.1	Frenos de ruedas	11
4.2	Ajuste del ángulo del manillar	12
4.3	Ajuste del ángulo de rodilla	12
4.4	Ajuste del ángulo de inclinación del asiento	12
4.5	Ajuste del ángulo de cadera	13
4.6	Plegado	13
4.7	Ajuste de altura del reposapiés	14
4.8	Ajuste de altura del respaldo	16
4.9	Ajuste de profundidad del asiento	16
4.10	Ajuste del reposabrazos	18
4.11	Bandeja de posicionamiento	18
4.12	Uso de silla Reach en un vehículo	19
Sección 5: Garantía limitada		20
Sección 6: Mantenimiento y registro de mantenimiento		21

Sección 1: Introducción, advertencias y características

1.1 Introducción

Gracias por elegir la silla Reach. Este manual explica cómo operar, ajustar y mantener su silla Reach. El producto descrito está sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

Lamentamos no poder ofrecer esta información de usuario en un formato apropiado para personas con discapacidad visual. Las personas con discapacidad visual deben comunicarse con un proveedor autorizado de Leggero para obtener información e instrucciones en forma de comunicación verbal y capacitación práctica si es necesario.

1.2 Usuario de Reach

Las sillas de rehabilitación y los sistemas de posicionamiento pediátrico son apropiados para niños que están limitados a una posición sentada y requieren movilidad y asistencia de posicionamiento. Las personas que necesitan dicha asistencia pueden tener una amplia variedad de diagnósticos que limitan su capacidad de lograr movilidad sin dicho sistema. Para obtener la clasificación de ocupación máxima y especificaciones adicionales, consulte la sección 1.7 de este manual.

1.3 Asistente del usuario de Reach

Los asistentes que operan la silla deben ser visual, mental y físicamente capaces de operar la silla de manera segura bajo cualquier circunstancia. Los asistentes deben leer y seguir todas las instrucciones proporcionadas en este manual.

1.4 Términos de garantía


La garantía se aplica solo cuando el producto se usa de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y para los fines previstos y las condiciones especificadas del producto.

1.5 Servicio y reparaciones

El servicio y la reparación de la silla Reach solo deben ser realizados por proveedores autorizados de Leggero. Si surge algún problema, comuníquese con el proveedor que suministró la silla. Los proveedores autorizados solo reemplazan e instalan repuestos originales de Leggero.



1.6 Características

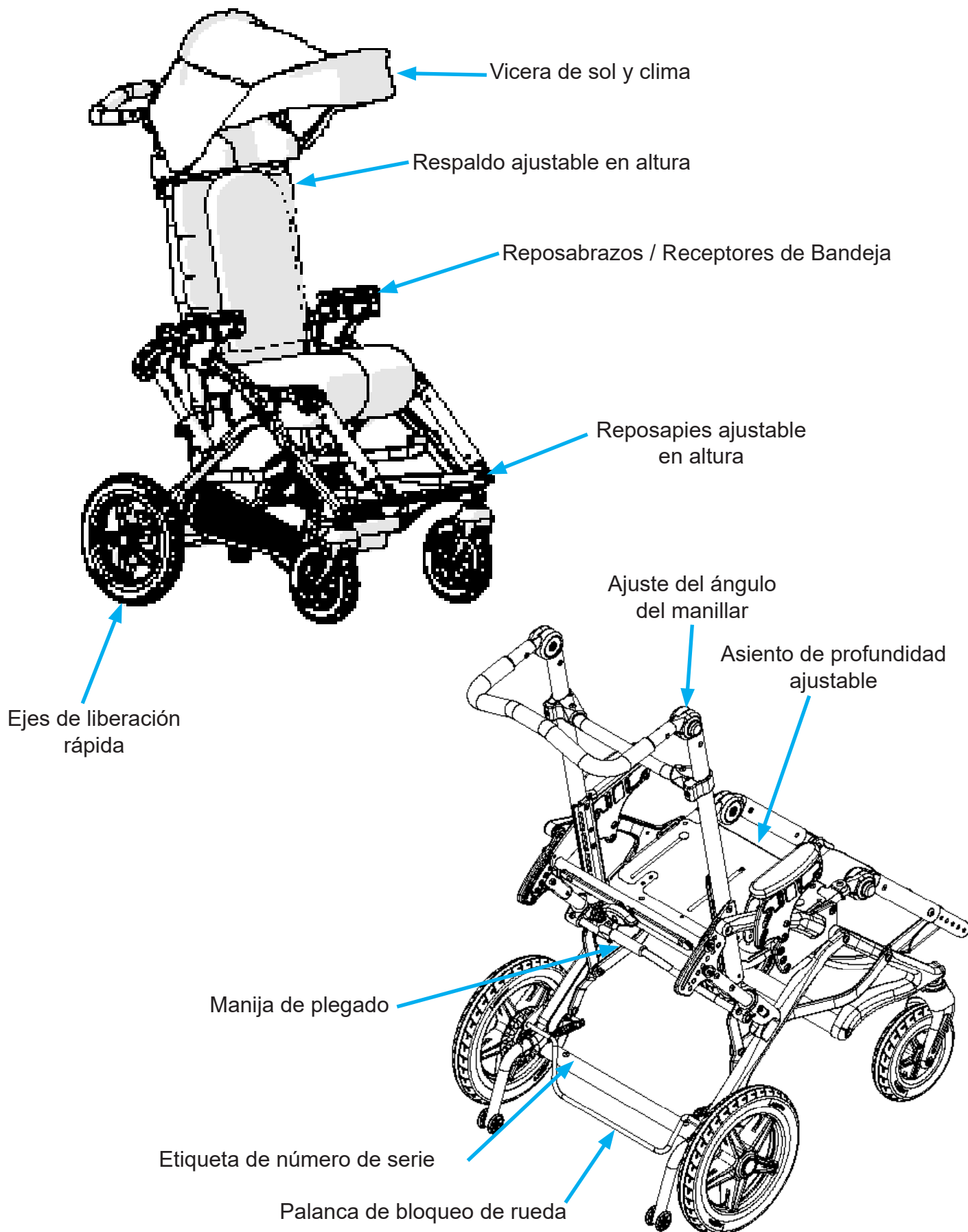

1.7 Ajustabilidad y especificaciones

Ajustabilidad

	Reach 12	Reach 14	Reach 16
Profundidad del asiento	8-13" (20-33cm)	11-16" (28-40cm)	13-18" (33-46cm)
Ancho del asiento	12" (30cm)	14" (35cm)	16" (40cm)
Asiento apoya piés	8-13" (20-33cm)	11-16" (28-40cm)	13-18" (33-46cm)
Altura máxima del respaldo	18" (46cm)	21" (53cm)	24" (61cm)
Ajuste del ángulo de cadera	85-115°	85-115°	85-115°
Ángulo del asiento	10°, 20°, or 30°	10°, 20°, or 30°	10°, 20°, or 30°

Especificaciones

	Reach 12	Reach 14	Reach 16
Peso máximo del usuario	80lb (36kg)	110lb (50kg)	150lb (68kg)
Peso base de movilidad	27lb (12kg)	29lb (13kg)	31lb (14kg)
Ancho promedio	21.5" (55cm)	23.5" (60cm)	25.5" (65cm)
Diámetro del neumático delantero	7" (18cm)	7" (18cm)	7" (18cm)
Diámetro del neumático trasero	16" (40cm)	16" (40cm)	16" (40cm)
Dimensiones plegadas	31 x 21.5 x 18" (79 x 55 x 46cm)	31 x 23.5 x 18" (79 x 60 x 46cm)	33 x 25.5 x 18" (84 x 65 x 46cm)
Máxima pendiente segura	5°	5°	5°

Sección 2: Advertencias

Lea este manual completamente antes de usar

Todos los cuidadores y/o asistentes deben leer este manual de usuario antes de operar la silla Reach. Familiarícese con el manejo y las funciones del producto antes de su uso real. Si hay alguna información en este manual que no comprende, comuníquese con su proveedor autorizado de Leggero para obtener ayuda.

Si no sigue las instrucciones o no cumple con las advertencias contenidas en este manual, podrían producirse lesiones personales y / o daños en la silla Reach, lo que podría anular la garantía.

Símbolos utilizados en las etiquetas de advertencia del producto y en el manual de usuario



¡ADVERTENCIA!

La palabra “ADVERTENCIA” o este símbolo indican prácticas que no son seguras o peligrosas y que podrían ocasionar lesiones graves al ocupante y/o cuidador.



¡ADVERTENCIA! LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

Elija la silla adecuada y las opciones de seguridad

En la industria de la movilidad, hay varias opciones disponibles para satisfacer las necesidades de los niños. Asegúrese de que su elección (y la de su proveedor) de silla y otras opciones tenga en cuenta la comodidad, la posición, las limitaciones físicas y los riesgos de su hijo que pueden encontrar durante el uso diario.

Advertencias: el incumplimiento de estas advertencias podría provocar lesiones graves o la muerte

¡ADVERTENCIA! Todos los cuidadores y/o asistentes deben leer este manual de usuario antes de operar la silla Reach. Familiarícese con el manejo y las funciones del producto antes de su uso real. Si hay alguna información en este manual que no comprende, comuníquese con su proveedor autorizado de Leggero para obtener ayuda.

¡ADVERTENCIA! El uso y/o manejo no convencional del producto puede ser peligroso. La silla de paseo no es segura para patinar o actividades similares de alta velocidad. Las ruedas delanteras giratorias pueden tambalearse a mayor velocidad y pueden causar una parada repentina y volcarse de la silla. Para la máxima seguridad, use la silla solo a la velocidad normal para caminar. Bajo ninguna circunstancia debe soltar el manillar mientras empuja. Nunca se aleje de la silla.

¡ADVERTENCIA! La configuración inicial de esta silla de paseo debe ser realizada por un técnico calificado.

¡ADVERTENCIA! Los procedimientos que no sean los descritos en este manual deben ser realizados por un técnico calificado.

¡ADVERTENCIA! El peso que lleva la silla Reach no debe exceder el límite de peso total de 80 lb/36 kg para sillas de 12", 110 lb/50 kg para sillas de 14" o 150 lb/68 kg para sillas de 16" (peso máximo del ocupante más peso de accesorios y/o artículos llevados).

¡ADVERTENCIA! Los ajustes realizados en la silla pueden afectar la estabilidad y aumentar el riesgo de vuelco. Los ajustes deben ser realizados por su proveedor Leggero autorizado.

¡ADVERTENCIA! Evite mojar la silla o guardarla en ambientes húmedos. El exceso de humedad puede causar óxido o corrosión, lo que puede provocar la falla del componente. Si la silla está expuesta a la humedad, séquela bien.

¡ADVERTENCIA! No deje la silla o al niño al sol o cerca de otras fuentes de calor, ya que las superficies de la silla pueden alcanzar temperaturas capaces de quemar al niño. No deje la silla o al niño afuera en temperaturas frías porque el contacto con una silla a temperaturas bajo cero podría provocar lesiones. La exposición a temperaturas extremadamente altas o bajas pueden dañar la silla.

¡ADVERTENCIA! La silla solo debe usarse en terreno sólido y nivelado. No intente empujar la silla hacia arriba o hacia obstáculos. Siempre retire al niño de la silla cuando levante la silla para pasar por obstáculos.

¡ADVERTENCIA! No use la silla en pendientes de más de 5 grados. No deje la silla estacionada en un desnivel o una pendiente. Preste especial atención cuando esté en pendientes e inclinaciones para evitar que el niño se caiga de la silla, la silla se vuelque o la silla se ruede.

¡ADVERTENCIA! Antes de abandonar la silla y antes de entrar y salir de ella, active siempre los frenos de las ruedas. No use los frenos de las ruedas para detener la silla mientras se mueve.



¡ADVERTENCIA! Nunca deje a su hijo desatendido en la silla, incluso si está atado y las trabas de las ruedas están enganchadas.

¡ADVERTENCIA! Si el ocupante de la silla busca objetos al frente, a los lados o detrás de la silla, asegúrese de que no se inclinen demasiado. El cambio del centro de gravedad puede hacer que la silla se vuelque.

¡ADVERTENCIA! No se pare sobre el reposapiés cuando lo transfiera dentro o fuera de la silla.

¡ADVERTENCIA! Al plegar la silla, tenga en cuenta que existe el riesgo de lesiones si los dedos se aplastan o quedan atrapados. Consulte la sección 4.6 de este manual para obtener más información.

¡ADVERTENCIA! Las correas de los arneses de pecho o cinturones de regazo pueden quedar atrapadas en el soporte de bloqueo plegable. Recorte todas las correas lo antes posible. Asegúrese siempre de que el marco esté bloqueado en posición vertical antes de reanudar el uso. Cuando se despliegue, escuchará un “clic” cuando el marco se bloquee.

¡ADVERTENCIA! La silla solo está diseñada para transportar a un niño a la vez. No cargue más de un niño a la vez.

¡ADVERTENCIA! Solo levante la silla por partes que estén firmemente unidas. Preferentemente del marco lateral deben levantar la silla siempre que sea posible. Si está plegado, sostenga la silla por los tubos del marco lateral inferior. Siempre use dos personas para levantar para evitar lesiones y daños a la silla.

¡ADVERTENCIA! Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. Deseche todo el material de empaque plástico inmediatamente después de desempacar.

¡ADVERTENCIA! Si su silla no está equipada con la opción de tránsito, no la use como asiento en un vehículo motorizado. Transfiera al niño de la silla a un asiento aprobado para vehículos motorizados. Si su silla está equipada con la opción de transporte, consulte la sección 4.12 de este manual.

¡ADVERTENCIA! La silla debe ser inspeccionada y mantenida según la tabla en la Sección 6: Mantenimiento. Los problemas detectados deben repararse antes de reanudar el uso de la silla.

¡ADVERTENCIA! Muchos de los sujetadores utilizados para construir la silla Reach consisten en un perno con una tuerca que contiene un anillo de bloqueo de nylon. Estas conexiones deben mantenerse y asegurarse con los sujetadores del equipo original y ajustarse adecuadamente. Para un ajuste adecuado de los puntos de pivote, consulte a su proveedor de servicio autorizado.

Sección 3: Desempacando su silla Reach

1. Retire la silla del embalaje.
2. Deseche todos los materiales de embalaje plástico.
3. Despliegue el marco y el respaldo del asiento, consulte la Sección 4.6 de este manual.
4. Instale las ruedas traseras. Consulte la figura **1**.
5. Verifique el ajuste adecuado de los ejes de liberación rápida tirando de la rueda hacia afuera. La rueda debe mantenerse en su lugar.
6. Enganche los frenos de las ruedas, consulte la sección 4.1 de este manual.
7. Instalar los antivuelcos. Referencia figura 2.

¡ADVERTENCIA! Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. Deseche todo el material de empaque plástico inmediatamente después de desempacar.

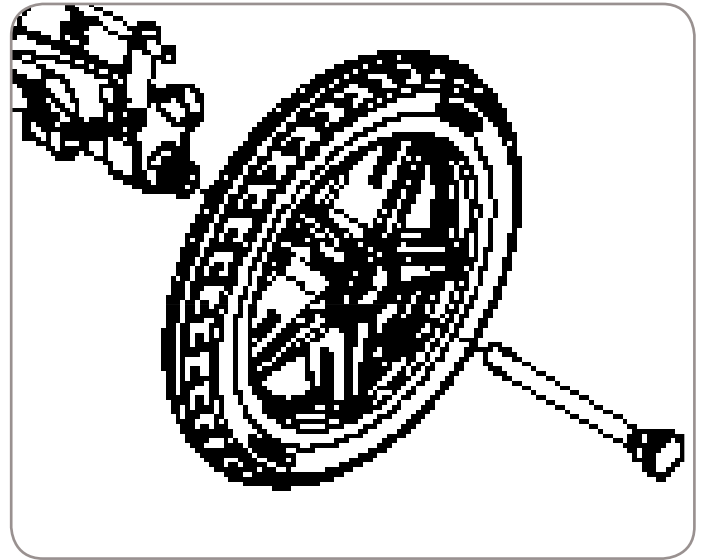


Figura 1


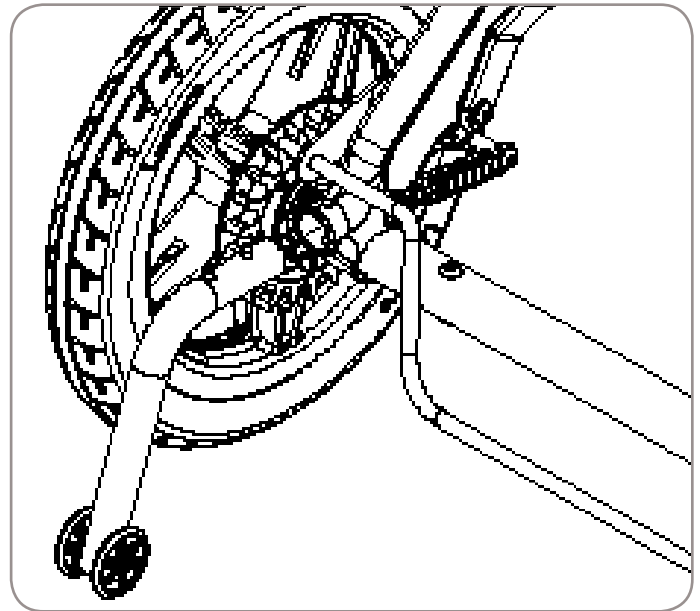



Figura 2

Sección 4: Operación y Ajuste


Herramientas necesarias:

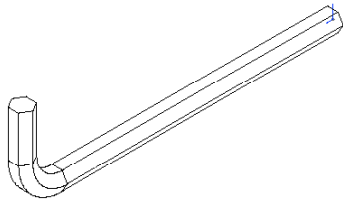

Llave hexagonal de 4 mm

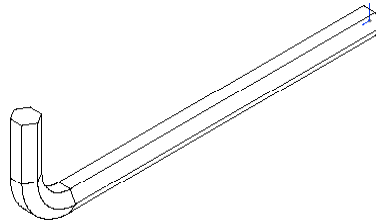

Llave hexagonal de 5 mm

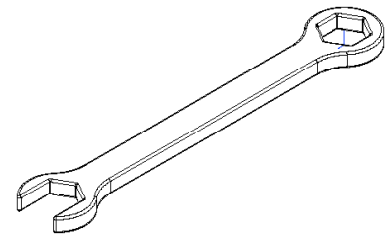

Llave de 13 mm

4.1 Operación de frenado de las ruedas

1. Para activar los frenos de las ruedas, empuje la barra transversal hacia abajo con el pie. Figura de referencia 3.
2. Verifique que los frenos de las ruedas estén enganchados a cada lado tratando de mover la silla de adelante hacia atrás.
3. Para desactivar los frenos de las ruedas, jale la barra transversal con el pie. Referencia figura 4.

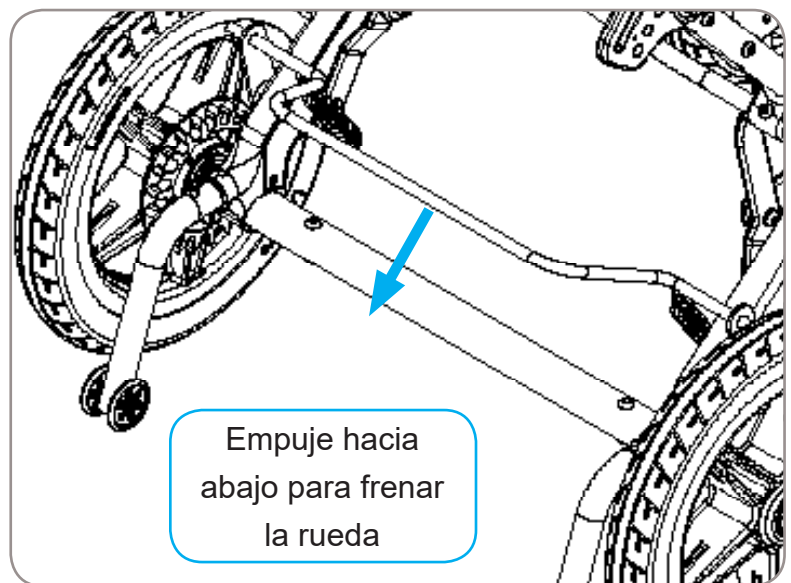


Figura 3

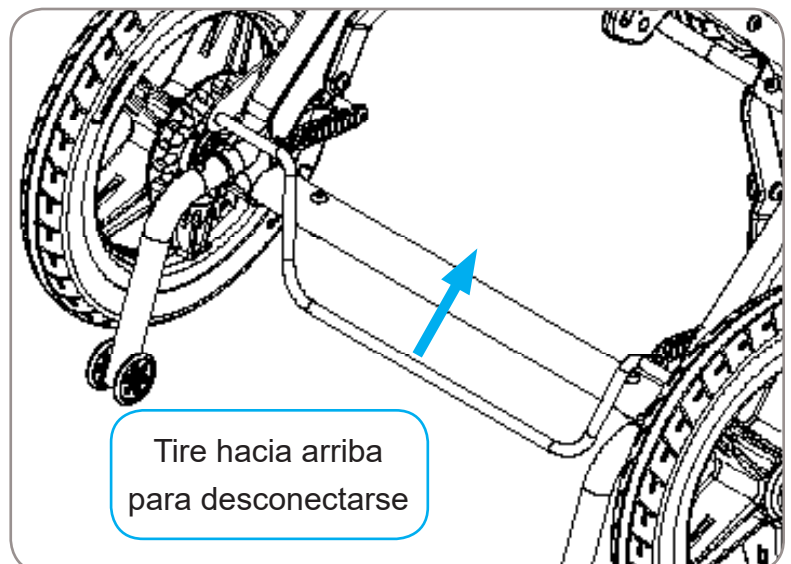


Figura 4

4.2 Ajuste del ángulo del manillar

1. Mantenga presionados los botones en el exterior de cada barra de ajuste. Consulte la figura 5.
2. Ajuste el manillar al ángulo deseado.
3. Suelte los botones.

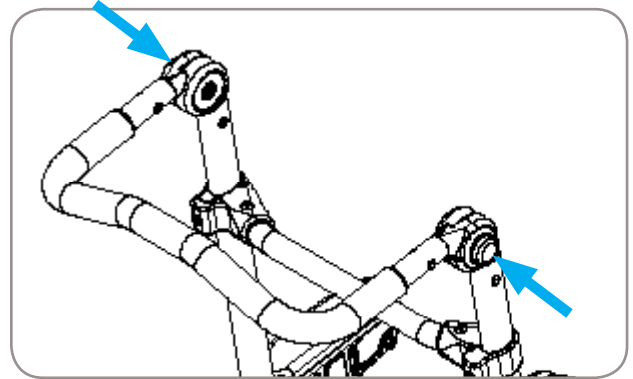


Figura 5

4.3 Ajuste del ángulo de rodilla

1. Mantenga presionados los botones en el exterior de cada barra de ajuste. Consulte la figura 6.
2. Ajuste las rodillas al ángulo deseado.
3. Suelte los botones.

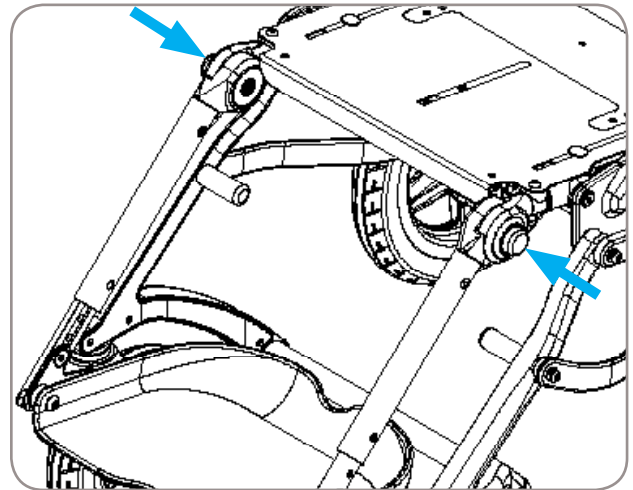


Figura 6

4.4 Ajuste del ángulo de inclinación del asiento

1. Coloque los frenos de las ruedas.
2. Retire el perno y la tuerca de los lados izquierdo y derecho, consulte la figura 7. Se requiere una llave hexagonal de 5 mm y una llave de 13 mm.
3. Ajuste el asiento al ángulo deseado, consulte la figura 8.
4. Instale pernos y tuercas, apriete. No apriete demasiado, esto podría dañar el tubo del asiento.
5. Ajuste el ángulo de la cadera al ángulo deseado, sección de referencia 4.5.

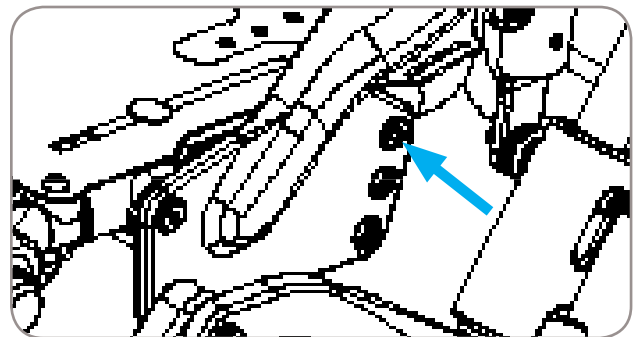


Figura 7


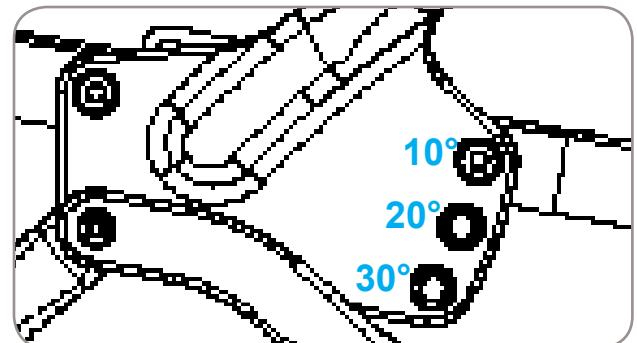


Figura 8

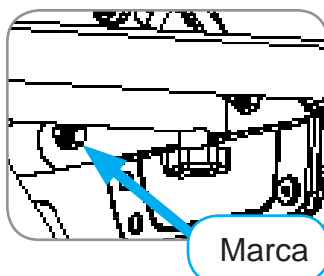

Marca

4.5 Ajuste del ángulo de cadera

1. Coloque el freno de las ruedas.
2. Coloque una mano en el manillar.
3. Gire la manija en cualquier dirección para desbloquear el ángulo de la cadera.
4. Ajústese a la posición deseada.
5. Suelte la manija para bloquearla en su posición.
6. Para verificar que el ángulo de la cadera esté bloqueado, verifique la alineación del conjunto de la manija. Los enlaces deben ser paralelos al tubo como se muestra en la figura 9.

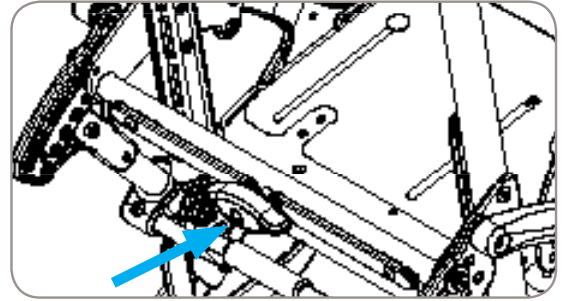


Figura 9, Bloqueado


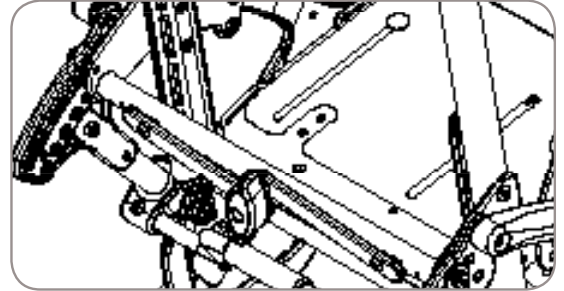


Figura 10, Desbloqueado



Bloqueado

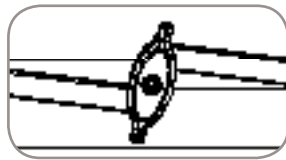


Desbloqueado

4.6 Plegado y desplegado

Plegado

1. Coloque el freno de las ruedas **1**.
2. Si la silla tiene un ángulo de asiento de 20° o 30°, ajuste el ángulo de la cadera a la posición más adelantada **2**.
3. Si la silla tiene un ángulo de asiento de 10°, ajuste el ángulo de la cadera una posición hacia atrás desde el extremo más hacia adelante **3**.
4. Coloque una mano en el manillar, con la otra mano tire del mango plegable hacia arriba **4**.
5. Empuje hacia adelante en el manillar mientras levanta la barra de ajuste del ángulo de la rodilla para plegar la silla **5**.
6. Ajuste el manillar hacia adentro **6**.
7. Voltar la plantilla hacia arriba **7**.
8. Ajuste el ángulo de la rodilla lo más adentro posible **8**.

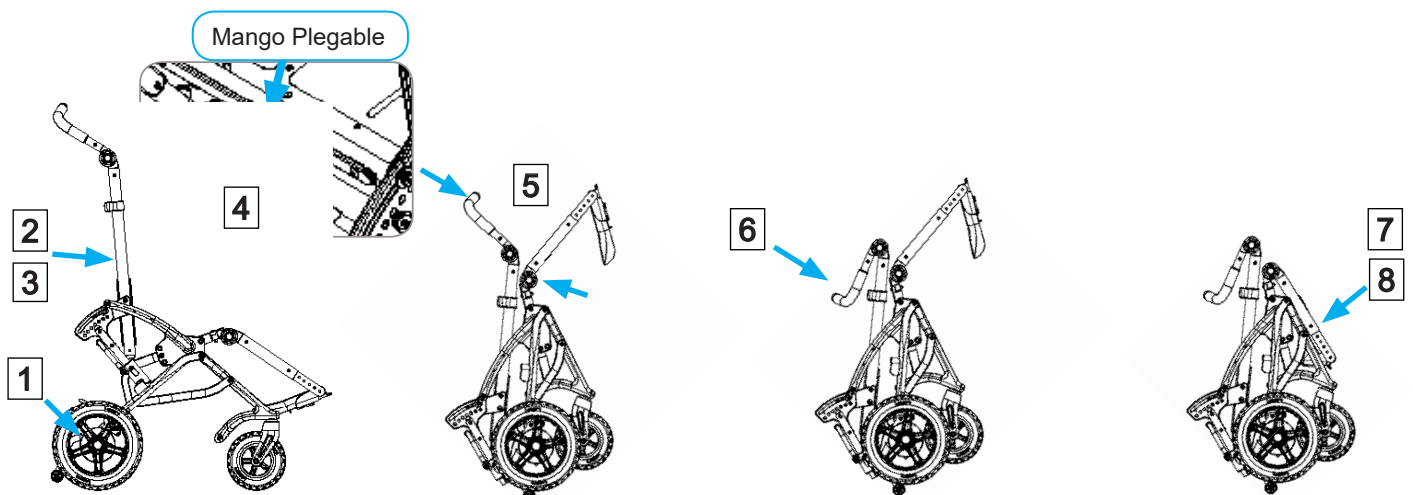

Coloque el freno de las ruedas. Ajuste el ángulo de la cadera hacia adelante.

Tire de la manija y doble sobre las ruedas, la espalda debe estar derecha.


Empuje el manillar hacia adentro.

Levantar la plataforma y Ajuste las rodillas.


4.6 Plegado y desplegado - Continuación

Desplegado


1. Balancee las barras de rodilla hacia afuera **1**.
2. Voltear la plantilla hacia abajo **2**.
3. Ajuste el manillar hacia afuera **3**.
4. Girando sobre las ruedas, tire hacia atrás del manillar hasta que el mecanismo de bloqueo se bloquee en la posición **4**.

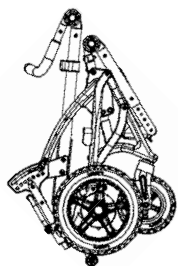


Doblada.

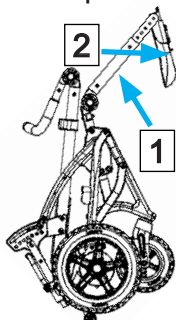

Balancee las barras de rodilla hacia afuera. Voltear la plantilla hacia abajo.

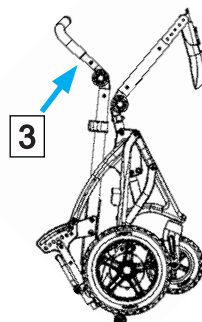

Tire el manillar hacia afuera.

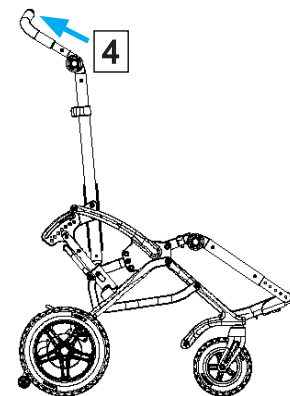

Levantar la plataforma y ajustar las rodillas.

¡ADVERTENCIA! Al plegar o desplegar, mantenga los brazos, manos y pies alejados de los componentes móviles para evitar lesiones. Referencia figura 13, las flechas indican posibles puntos de pellizco.

¡ADVERTENCIA! Las correas de los arneses de pecho o cinturones pueden quedar atrapadas en el soporte de bloqueo plegable. Recorte todas las correas lo antes posible y coloque las hebillas del cinturón de regazo antes de plegarlas.

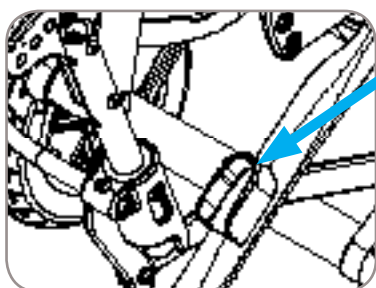


Figura 12

Las correas aquí pueden evitar que el marco se bloquee

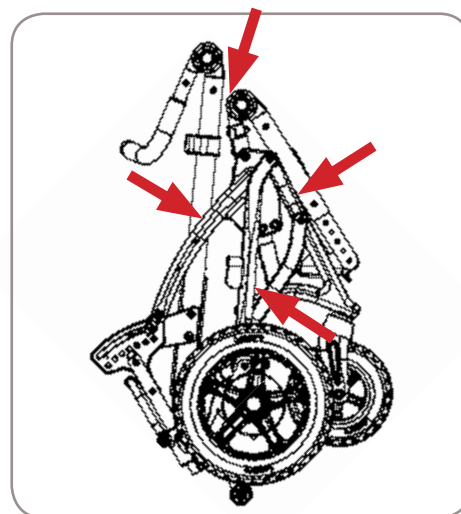


Figura 13

4.7 Ajuste de altura del reposapiés

1. Retire los pernos izquierdo y derecho, consulte la figura 14. Se requiere una llave hexagonal de 5 mm.
2. Ajuste el reposapiés a la altura deseada.
3. Vuelva a instalar los pernos.

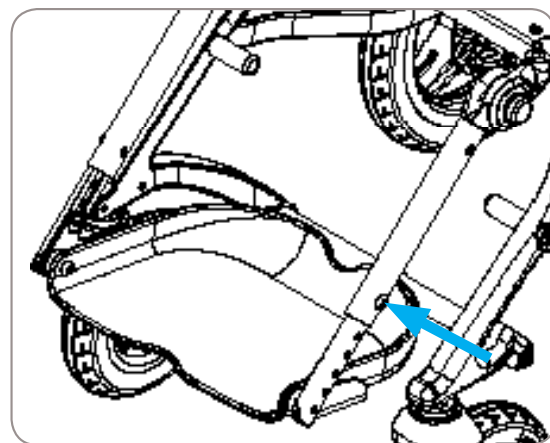


Figura 14

4.7 Ajuste de altura del reposapiés

Si su reposapiés está configurada actualmente como se muestra en la Figura 14, puede ser necesario ajustar el conjunto del reposapiés hacia abajo desde las extensiones del mismo (solo sillas de 12" y 14").

1. Retire los pernos como se describe en la sección anterior.
2. Retire el ensamblaje de reposapiés de la silla.
3. Retire la cabeza plana y los pernos de cabeza de botón de los lados izquierdo y derecho, consulte la figura 16. Se requiere una llave hexagonal de 5 mm.
4. Vuelva a instalar los pernos en la posición más baja en las extensiones de la plantilla como se muestra en la figura 17.
5. Vuelva a instalar el ensamblaje del reposapiés y ajústelo a la altura deseada.

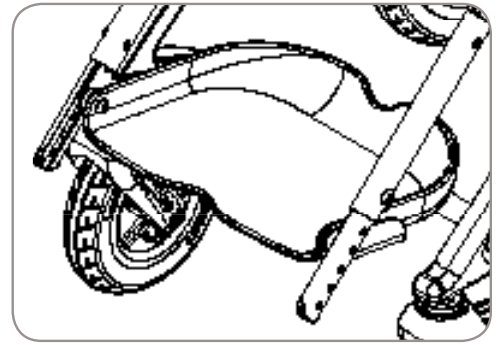


Figura 15

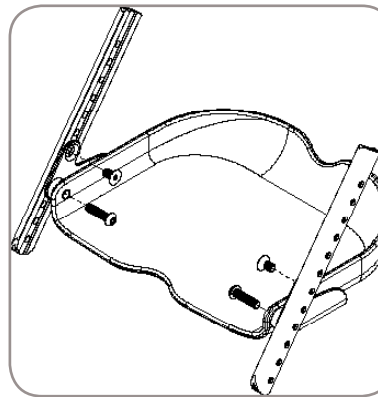


Figura 16

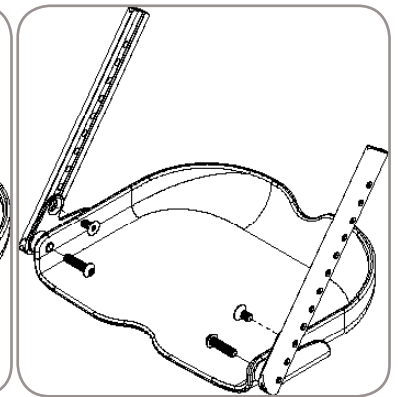


Figura 17

Para las unidades de 12", será necesario cambiar las extensiones del reposapiés para obtener caídas de las piernas más allá de 11in./28cm. Se suministraron extensiones más largas con su silla, pero si no las tiene, comuníquese con su proveedor autorizado.

1. Retire los pernos como se describe en la sección anterior. Referencia figura 18.
2. Instale extensiones más largas como se muestra en la Figura 19. Para la siguiente posición de caída de la pierna más allá de lo que se podía lograr con extensiones más cortas, instale pernos de cabeza plana a través del séptimo orificio desde la parte superior de las extensiones del reposapiés.
3. Instale el ensamblaje del reposapiés en la silla y ajústelo a la altura deseada.

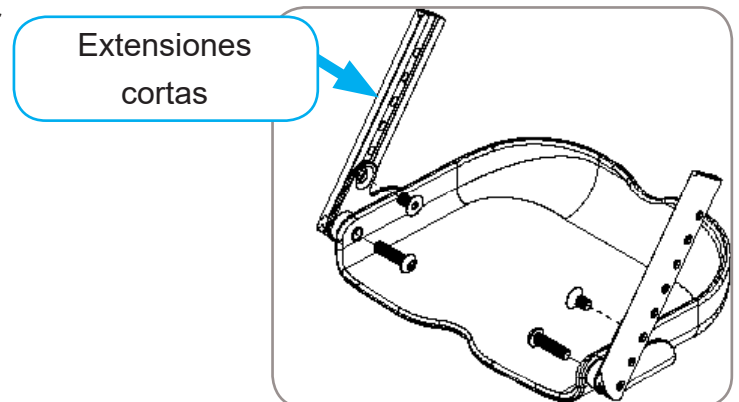


Figura 18

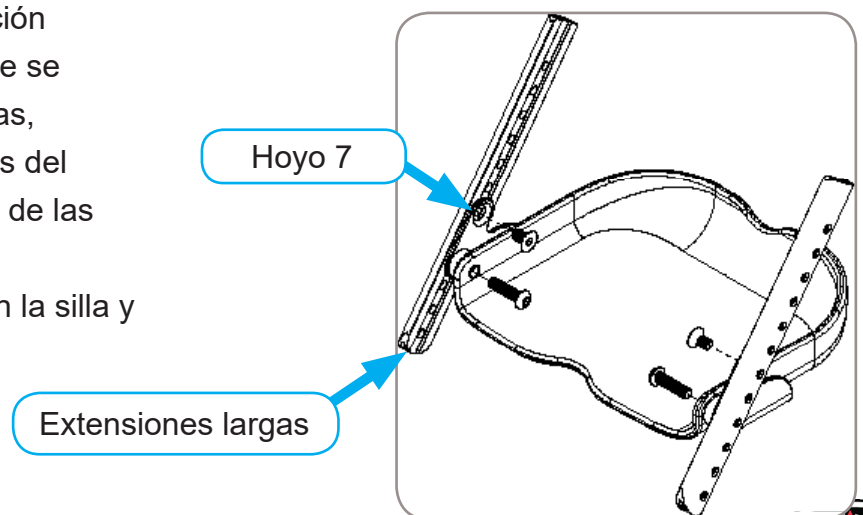


Figura 19

4.8 Ajuste de altura del respaldo

Respaldo ajustable contorneado

1. Afloje los pernos (2) en los lugares que se muestran en la figura 20. Se requiere una llave hexagonal de 5 mm.
2. Ajuste de nuevo a la altura deseada.
3. Apriete los pernos.

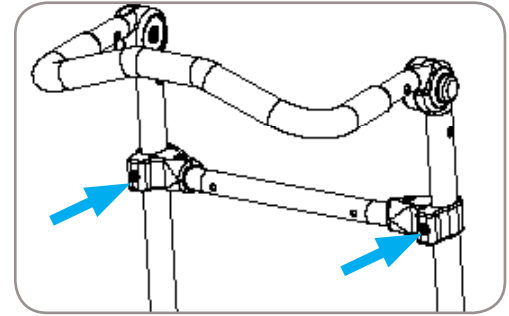


Figura 20

Respaldo ajustable contorneado con placa rígida

1. Afloje los pernos (4) en los lugares que se muestran en la figura 21. Se requiere una llave hexagonal de 5 mm.
2. Ajuste de nuevo a la altura deseada.
3. Apriete los pernos.

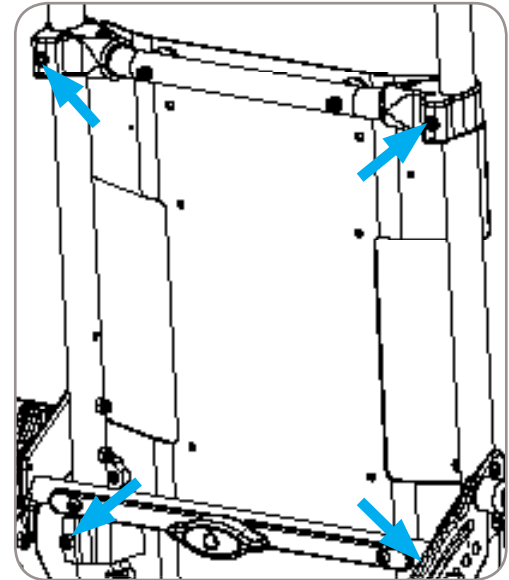


Figura 21

4.9 Ajuste de profundidad del asiento

1. Afloje las correas del cojín del asiento.
2. Afloje las perillas debajo de la placa del asiento. Figuras de referencia 22 o 23.
3. Ajuste el conjunto del asiento delantero a la profundidad deseada.
4. Apriete la perilla.
5. Apriete las correas de los cojines del asiento.

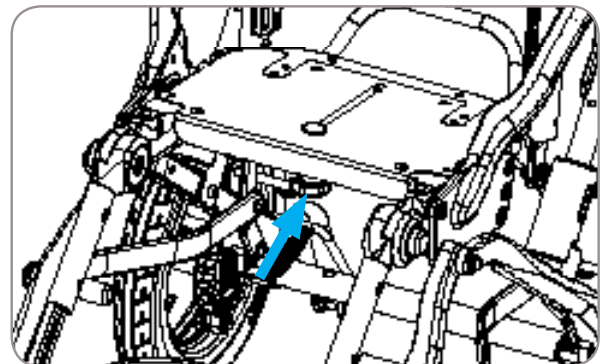


Figura 22, Silla de una sola perilla de 12

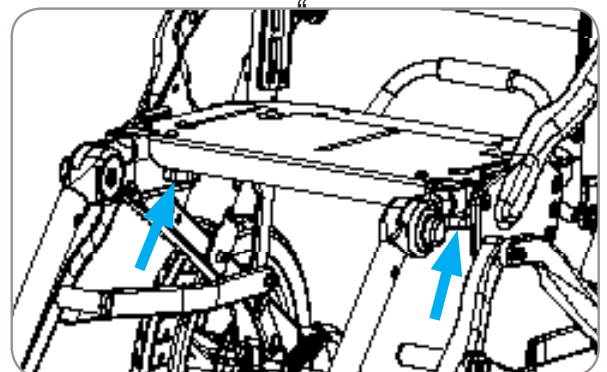


Figura 23, 2 perillas Silla de 14 "y 16"

4.9 Ajuste de profundidad del asiento continuo

Para sillas de 12" y 14", puede ser necesario quitar la placa de ajuste del asiento para extender la profundidad del asiento a la posición deseada. Con sillas de 12", será necesario retirar la placa para lograr profundidades de asiento de 11" - 13". Con sillas de 14", será necesario quitar la placa para lograr profundidades de asiento de 14" - 16".

1. Retire el cojín del asiento.
2. Retire los tornillos delanteros **1** con una llave hexagonal de 4 mm y una llave de 10 mm.
3. Retire los pernos de ajuste de profundidad del asiento **2** y las perillas.
4. Retire el conjunto de la placa del asiento de la silla.
5. Retire la placa de ajuste de profundidad del asiento **3** de la placa del asiento con una llave hexagonal de 4 mm y una llave de 10 mm.
6. Vuelva a instalar la placa del asiento como se muestra en la figura 26.
7. Vuelva a instalar los pernos delanteros, los pernos de ajuste de profundidad del asiento y las perillas.

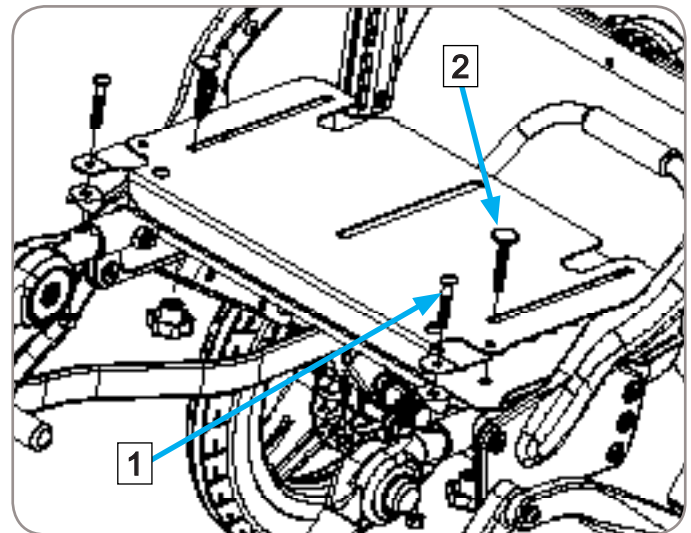


Figura 24

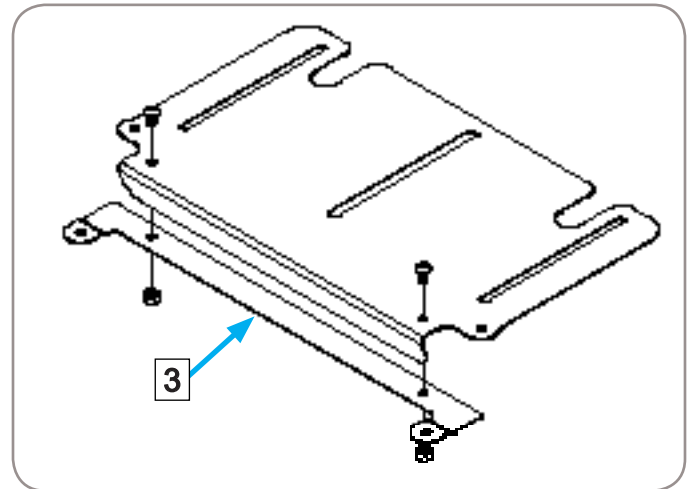


Figura 25

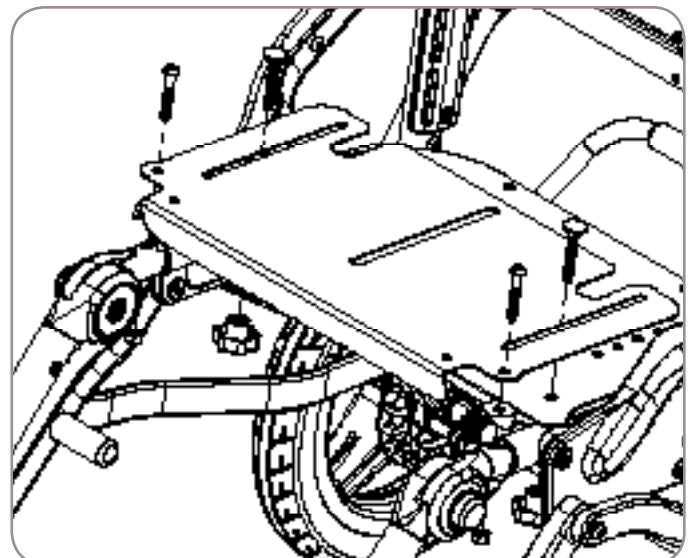


Figura 26

4.10 Ajuste del reposabrazos

Para ajustar la altura:

1. Retire los pernos de cabeza de botón (4). Se requiere una llave hexagonal de 4 mm. Referencia figura 27.
2. Ajuste a la altura deseada.
3. Vuelva a instalar los pernos.

Para ajustar el ángulo:

1. Retire los tornillos de la cabeza del botón trasero (2). Se requiere una llave hexagonal de 4 mm. Referencia figura 28.
2. Ajuste al ángulo deseado.
3. Vuelva a instalar los pernos.

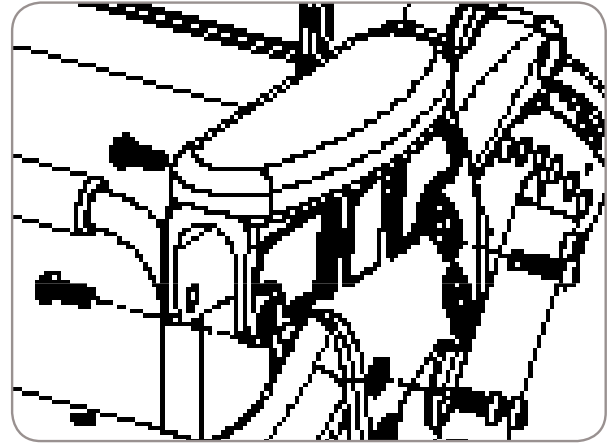


Figura 27

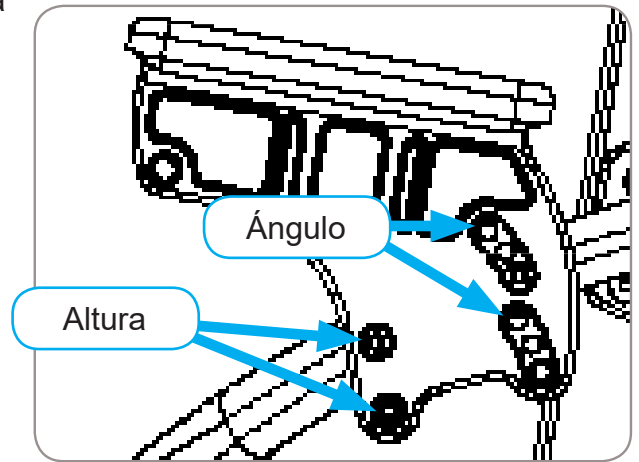


Figura 28

4.11 Bandeja de posicionamiento

1. Para colocar la bandeja, gire los bloqueos de la bandeja izquierda y derecha hacia abajo. Referencia figura 29.
2. Deslice la bandeja en los receptores y ajústela a la profundidad deseada.
3. Gire los bloqueos de la bandeja izquierda y derecha hacia arriba para fijarla en su lugar. Referencia figura 30.

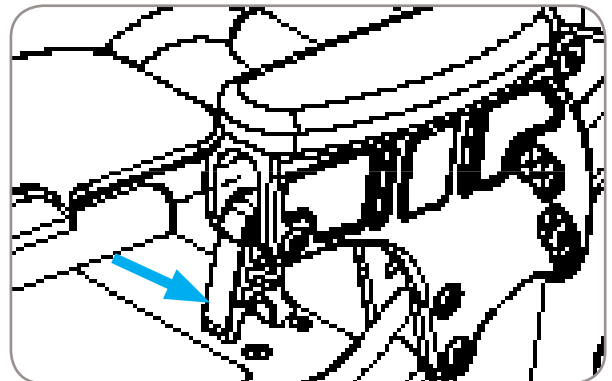


Figura 29

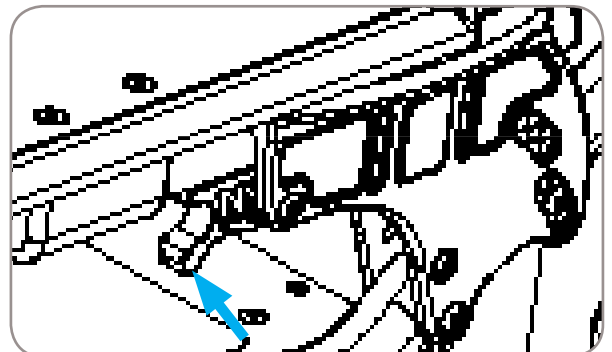


Figura 30

4.12 Uso de la silla Reach como asiento en un vehículo

La silla Reach está aprobada para transportar niños en vehículos cuando está equipada con la función de tránsito OPCIONAL y se usa de acuerdo con estas instrucciones. La silla debe estar asegurada en una posición orientada hacia adelante con un sistema de sujeción de la silla de ruedas (WTORS) que cumpla con los requisitos de la práctica recomendada SAE J2249: sistemas de sujeción de la silla de ruedas para su uso en vehículos de motor.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Esta silla cumple y se ha probado dinámicamente de acuerdo con ANSI / RESNA WC / Vol. 1 - Sección 19.5.3.

Comuníquese con Leggero o con su proveedor autorizado de Leggero si tiene alguna pregunta sobre el uso de la silla en un vehículo de motor. La información de contacto se puede encontrar en la página 2 de este manual.

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES:

- La silla Reach se debe usar como se indica en estas instrucciones y en las instrucciones proporcionadas por el fabricante de amarres montados en el vehículo.
- El ocupante de la silla debe ser transferido al asiento del vehículo y usar el sistema de retención del vehículo siempre que sea posible.
- No exceda las clasificaciones de peso máximo del ocupante. Consulte la Sección 1.8 de este manual.
- La silla Reach debe colocarse en una posición orientada hacia adelante cuando se usa como asiento en un vehículo. Use un sistema de amarre aprobado de 4 puntos tipo correa para la silla. Use un cinturón aprobado de 3 puntos para ocupantes de más de 50 lb / 23 kg. Para los ocupantes de menos de 50 lb / 23 kg, se requiere un arnés de tránsito de 5 puntos.
- Para conocer las ubicaciones de amarre de tránsito aprobadas y la ubicación del pasador de fijación del cinturón / arnés, consulte las Figuras 31 y 32.
- Las sujeciones no deben mantenerse alejadas del cuerpo del niño por los componentes o accesorios de la silla.
- Las correas del cinturón o del arnés deben ajustarse hasta que no tengan holgura. Si puede pellizcar las correas del cinturón entre sus dedos, entonces está demasiado flojo.
- Solo restricciones de cinturón que cumplan con las disposiciones de ANSI / RESNA WC / Vol. 1 - La Sección 19 4.9.2-4.9.5 y 5.2 que se han probado dinámicamente de acuerdo con los Anexos A y 5.3 de la misma, se deben usar en la silla para usar como amarres en un vehículo.

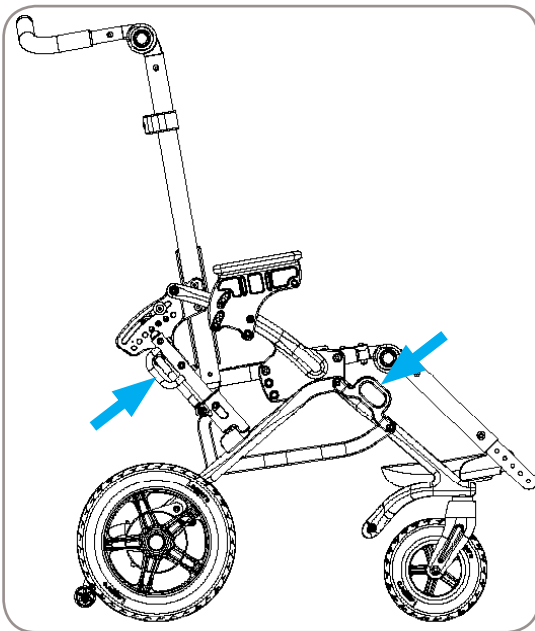


Figura 31

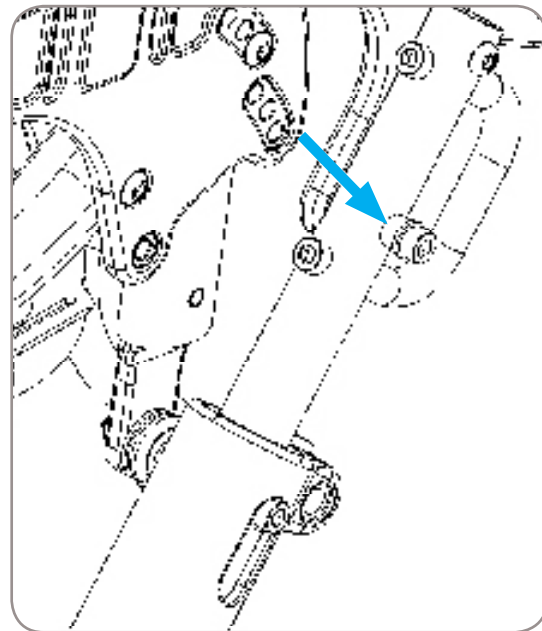


Figura 32, Accesorio de cinturón / arnés

¡ADVERTENCIA! Si su silla no está equipada con la opción de tránsito, no la use como asiento en un vehículo motorizado. Transfiera al niño de la silla a un asiento aprobado para vehículos motorizados.

Sección 5: Garantía limitada

A. ESTA GARANTÍA SE EXTIENDE SOLO AL COMPRADOR ORIGINAL DE NUESTROS PRODUCTOS.

B. PARA TODA LA VIDA

Leggero LLC garantiza el marco y los ejes de liberación rápida de esta silla contra defectos en materiales y mano de obra de por vida al comprador original. La vida esperada de este marco es de cinco años.

C. POR UN (1) AÑO

Garantizamos todas las piezas y componentes del equipo original de esta silla contra defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de la fecha de compra del primer consumidor.

D. LIMITACIONES

1. Nosotros no garantizamos:
 - Neumáticos, tubos, tapicería, empuñaduras de empuje o brazaletes.
 - Daños resultantes de negligencia, mal uso o instalación o reparación inadecuada.
 - Daños resultantes del uso del tránsito.
 - Damage from exceeding the weight limit indicated on the serial number label.
2. Esta garantía es válida solo cuando el producto se usa de acuerdo con las condiciones especificadas y propósitos previstos, siguiendo todas las recomendaciones del fabricante. Es nulo lo contrario.
3. Esta garantía no se aplicará a los problemas derivados del desgaste normal, y dicha evaluación será únicamente determinado por Leggero LLC.
4. Esta garantía es nula si el producto se modifica sin el consentimiento expreso por escrito de Leggero, incluidos, pero sin limitarse a modificaciones a través del uso de partes o accesorios no autorizados; productos dañados por motivo de reparaciones realizadas a cualquier componente sin el consentimiento específico de Leggero; o a un producto dañado por circunstancias fuera del control de Leggero, y dicha evaluación será determinada únicamente por Leggero.
5. Esta garantía es nula si se elimina o altera el número de serie original.
6. Esta garantía se aplica solo en los EE. UU. Consulte con su proveedor si se aplican garantías internacionales.

E. LO QUE HARÁ EL FABRICANTE

Nuestra única responsabilidad es reparar o reemplazar las partes cubiertas. Este es el remedio exclusivo para consecuencia sobre daños y perjuicios.

F. QUE DEBE HACER

1. Obtenga de nosotros, mientras esta garantía esté vigente, aprobación previa para la devolución o reparación de piezas cubiertas.
2. Devuelva el producto o partes, flete pre-pagado a Leggero LLC. Póngase en contacto con el servicio al cliente de Leggero en 1-844-503-KIDS para obtener una dirección de devolución y obtener un número de autorización de devolución (RA #).
3. Pague el costo de la mano de obra para reparar, eliminar o instalar piezas.

G. AVISO AL CONSUMIDOR

1. Si lo permite la ley, esta garantía reemplaza a cualquier otra garantía, escrita u oral, expresa o implícita, incluyendo una garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.
2. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales. También puede tener otros derechos que varían en diferentes estados, territorios o provincias.



Sección 6: Mantenimiento

Consulte a su proveedor autorizado si tiene preguntas sobre el mantenimiento de su silla Reach. El mantenimiento constante y minucioso extenderá la vida útil de su silla. Un mantenimiento inadecuado puede disminuir significativamente la vida útil de la silla. Cualquier parte dañada debe reemplazarse antes de reanudar el uso de la silla. La silla debe limpiarse regularmente y debe ser revisada por un distribuidor autorizado al menos una vez al año.

La garantía puede verse afectada si no se realiza el mantenimiento adecuado en los intervalos especificados. Consulte la tabla a continuación para conocer los procedimientos y la frecuencia de mantenimiento recomendados. Hay un registro de mantenimiento en la siguiente página de este manual que debe usarse para documentar las actividades de mantenimiento.

Tipo de mantenimiento	Semanal	Mensual
Revise las ruedas y los neumáticos por desgaste o daños		✓
Verifique la función de frenado de las ruedas	✓	
Verifique la alineación adecuada de las ruedas		✓
Verifique que todas las sujeciones estén apretadas		✓
Verifique que los ejes de liberación rápida funcionen correctamente	✓	
Verifique el mecanismo de bloqueo de inclinación para un acoplamiento adecuado	✓	
Verifique el mecanismo de bloqueo de reclinación para un acoplamiento adecuado	✓	
Revise todos los componentes estructurales por desgaste o daños		✓
Revise todos los componentes accesorios por daños		✓

Recomendamos que la silla se limpie regularmente:

- Limpie todos los componentes del marco y las piezas de plástico utilizando solo detergentes suaves. Las partes de la tela se pueden lavar. Si usa una lavadora, colóquelos en una bolsa de lino o en una funda de almohada. Secar al aire.
- En la mayoría de los casos, limpiar con un paño húmedo es suficiente.
- No use su silla en agua salada, ya que puede provocar daños graves.
- Evite que la arena u otras partículas dañen la rueda y los rodamientos de la horquilla.

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Fecha	Servicio Proveedor	Técnico	Descripción del Servicio

Fecha	Servicio Proveedor	Técnico	Descripción del Servicio





Leggero LLC
174 D Shepherd Trail
Bozeman, MT 59718
Toll Free: 1-844-503-KIDS
www.leggero.us