




## INSTRUCCIONES DE USO

Cohecito para niños con necesidades especiales

# HIRO BUGGY

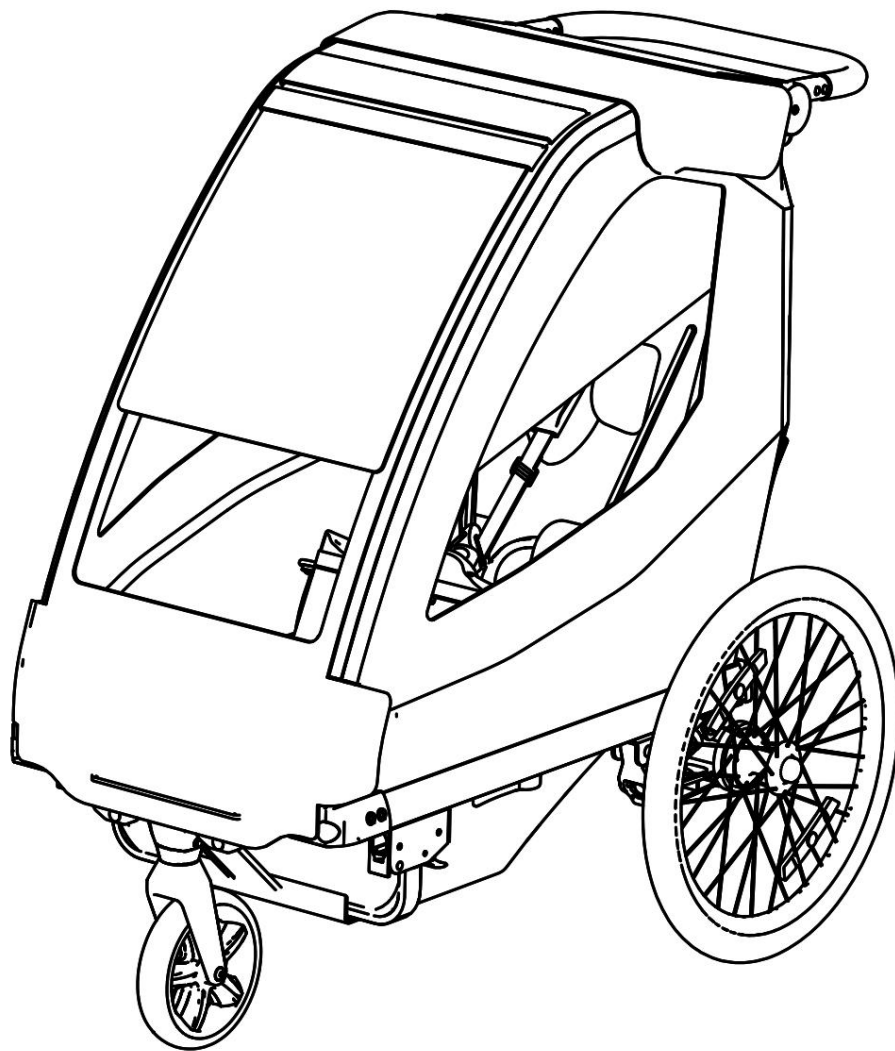



¡ATENCIÓN! EL FABRICANTE ES RESPONSABLE ÚNICAMENTE DEL EQUIPO COMPRADO A UN REPRESENTANTE DIRECTO DE LIW CARE TECHNOLOGY O EN UNA TIENDA MÉDICA ESPECIALIZADA REPRESENTACIÓN DE LIW CARE TECHNOLOGY EN POLONIA.



¡ATENCIÓN! DURANTE EL USO, MANTENIMIENTO, MONTAJE Y AJUSTES DE MECANISMOS, EXISTE RIESGO DE ATRAPAMIENTO Y/O PELLIZCAMIENTO DE PARTES DEL CUERPO DEL USUARIO/AYUDANTE EN LOS AGUJEROS/HUESOS ENTRE LOS ELEMENTOS. SE DEBE TENER ESPECIAL CUIDADO AL REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES. UNA VEZ TERMINADOS LOS AJUSTES, FIJE LA POSICIÓN APRIETE CUIDADOSAMENTE LAS TUERCAS/PERNOS.



¡ATENCIÓN! SI ES POSIBLE, CONSERVE EL EMBALAJE DEL PRODUCTO EN CASO DE QUE EL PRODUCTO NECESITE SER TRANSPORTADO PARA EFECTOS DE UNA REPARACIÓN EN GARANTÍA.



¡ATENCIÓN! NO DEJE AL NIÑO EN EL COCHECITO DESATENDIDO. EL COCHECITO NO ES DESTINADO A NIÑOS MENORES DE 1 AÑO.



¡ATENCIÓN! NO SUPERAR LA CARGA MÁXIMA DEL COCHECITO HIRO BUGGY.



¡ATENCIÓN! NO USE EL COCHECITO HIRO BUGGY SI ESTÁ DEFECTUOSO, DAÑADO O PARTES FALTANTES.



¡ATENCIÓN! AL UTILIZAR EL COCHECITO HIRO BUGGY COMO REMOLQUE PARA BICICLETAS, CIERRE LA PARTE DELANTERA TAPA CON IMANES EN LA PARTE INFERIOR Y CIERRES DE GANCHO EN LOS LADOS.



¡ATENCIÓN! AL UTILIZAR EL COCHECITO HIRO BUGGY COMO REMOLQUE PARA BICICLETAS, NO SUPERAR LA VELOCIDAD MÁXIMA DE 24 KM/H. LA VELOCIDAD SIEMPRE DEBE ADAPTARSE A LAS CONDICIONES EXISTENTES.



¡ATENCIÓN! AL UTILIZAR EL COCHECITO HIRO BUGGY FIJADO A UNA BICICLETA, ASEGÚRESE DE QUE LA CONEXIÓN ES FIABLE Y SEGURA. ASEGÚRESE DE QUE LA CONEXIÓN DEL CICLO NO RESTRINGIR EL RENDIMIENTO DE FRENADO Y DIRECCIÓN DEL CICLO.



¡ATENCIÓN! EL SOPORTE PARA BICICLETA SE PUEDE INSTALAR ÚNICAMENTE EN EL LADO IZQUIERDO DEL MARCO. AL UTILIZAR EL COCHECITO COMO REMOLQUE, ES NECESARIO UTILIZAR UNA BANDERA.



¡ATENCIÓN! AL UTILIZAR EL COCHECITO PARA NECESIDADES ESPECIALES HIRO BUGGY FIJADO A UNA BICICLETA, RECUERDE QUE EL REMOLQUE AUMENTA EL TAMAÑO DE TODO EL VEHÍCULO. UN CICLO CON EL EL REMOLQUE ADJUNTO ACELERA MÁS LENTO Y TIENE UN RENDIMIENTO DE FRENADO RETRASADO.



¡ATENCIÓN! AL UTILIZAR EL COCHECITO PARA NECESIDADES ESPECIALES HIRO BUGGY EN VISIBILIDAD REDUCIDA O DESPUÉS DE LA OSCURIDAD, SE DEBE UTILIZAR LA ILUMINACIÓN NECESARIA SEGÚN LAS NORMAS DE TRÁFICO.



¡ATENCIÓN! ANTES DE ARRANCAR Y UTILIZAR EL DISPOSITIVO, ES VITAL QUE LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO.



1. Introducción .....	4
1.1 Condiciones generales de seguridad.....	4 2
Símbolos.....	5 3 Cumplimiento de los requisitos de dispositivos
médicos.....	5 4 Indicaciones de uso del
dispositivo.....	5
5 Especificaciones técnicas.....	6 6 HIRO BUGGY Diseño general del
cochecito para necesidades especiales .....	7
6.1 Componentes del asiento del cochecito para necesidades especiales HIRO BUGGY.....	8 6.2 Componentes del
almazón del cochecito para necesidades especiales HIRO BUGGY .....	8 6.3
Iluminación .....	9 7 Instrucciones de plegado y
ajuste .....	9 7.1 Plegado del
cochecito .....	9 7.2 Bloqueo de la rueda trasera – freno de
estacionamiento.....	12 7.3 Ajuste de la manija de
empuje.....	12 7.4 Ajuste del
asiento .....	13 7.5 Ajuste del ángulo del
respaldo .....	14 7.6 Preparación para ajustar los elementos de
soporte .....	14 7.7 Ajuste del cierre de la correa
superior .....	15 7.8 Ajuste de la
suspensión .....	16 7.9 Montaje de parasoles y tapizados
delanteros.....	16 8
Accesorios.....	17
8.1 Soportes para el pecho.....	17 8.2 Soportes para la
cadera .....	18 8.3 Correa
estabilizadora .....	18 8.4
Podnózek .....	19 8.5
Reposacabezas .....	19 8,6 Rueda delantera de
16" .....	20 8.7 Montaje de la
bicicleta.....	¡Błąd! Nie zdefiniowano załkadki.
8.7.1 Conexión del remolque para bicicletas a una bicicleta .....	¡Błąd! Nie zdefiniowano załkadki.
8.7.2 Protecciones de seguridad.....	¡Błąd! Nie zdefiniowano załkadki.
9 Limpieza y mantenimiento .....	20 10 Almacenamiento y
transportado.....	21 11 Manejo el
dispositivo .....	21 12 Placa de identificación del cochecito para niños con
necesidades especiales.....	22 13 Placa de características del remolque para
bicicletas .....	¡Błąd! Nie zdefiniowano załkadki.
14 Garantía/servicio .....	

## 1. Introducción

El cochecito HIRO BUGGY para niños con necesidades especiales desarrollado y creado por LIW Care Technology está diseñado para transportar personas con discapacidades. Está diseñado para personas con trastornos que les imposibilitan moverse de forma independiente. La silla de paseo permite el transporte al aire libre sobre cualquier tipo de superficie pavimentada. El dispositivo se puede utilizar de muchas maneras, según la configuración. Como cochecito para necesidades especiales, el dispositivo se puede utilizar para transportar a personas con discapacidad en un entorno urbano sin necesidad de utilizar ningún dispositivo adicional. Como cochecito para necesidades especiales con una rueda delantera grande, el dispositivo se puede utilizar mientras se hace jogging. Como remolque para bicicletas, el dispositivo se puede acoplar a una bicicleta y utilizar como remolque para bicicletas.

El dispositivo médico HIRO BUGGY Cochecito para Niños con Necesidades Especiales se utiliza principalmente en las siguientes condiciones:

- parálisis cerebral (PC);
- Parálisis de diversas etiologías;
- columna vertebral hendida;
- mielomeningocele;
- Estado posterior a una lesión de columna;
- Estado post lesión craneal y cerebral;
- Estado posterior al accidente cerebrovascular;
- Postura defectuosa, especialmente escoliosis;
- Esclerosis múltiple;
- Problemas de coordinación motora;
- Problemas de equilibrio corporal.

Hemos hecho todo lo posible para que el cochecito para necesidades especiales sea lo más sencillo posible, proporcione una buena estabilización durante uso, permite ajustar la estructura a la posición y limitaciones del usuario y es seguro de usar.

Prestamos especial atención a la calidad de nuestros productos; por lo tanto, lea atentamente estas instrucciones; esto le ayudará a asegurar un uso seguro y cómodo del dispositivo, que será eficaz y le permitirá aprovechar al máximo todas sus ventajas.

Estas instrucciones deben guardarse en un lugar de fácil acceso. Las instrucciones están destinadas a un usuario adulto y a personas que cuidan directamente de usuarios con discapacidad.

### 1.1 Condiciones generales de seguridad

La mayor preocupación de LIW Care Technology Sp. z o.o. z oo se asegura de que los pacientes que utilizan nuestros dispositivos estén seguros. Con el fin de Para garantizar la total seguridad de los usuarios del dispositivo, es necesario cumplir en todo momento con las siguientes recomendaciones:

1. Antes de intentar utilizar el dispositivo, lea estas instrucciones de uso y si tienes dudas contacta con el vendedor o el fabricante.
2. Asegúrese de que toda la información, recomendaciones y advertencias especificadas en estos capítulos sean totalmente comprensibles.
3. Antes de intentar utilizar el dispositivo, compruebe todas las uniones atornilladas. No se permite jugar.
4. Antes de intentar utilizar el dispositivo, compruebe el estado de las ruedas. Las ruedas deben girar sin resistencia significativa. Asegúrese de que los neumáticos estén correctamente inflados. Los neumáticos deben estar en buen estado de funcionamiento, no desgastados ni dañados.
5. Antes de intentar utilizar el dispositivo, asegúrese de que el freno de mano esté en buen estado de funcionamiento.

Las instrucciones de uso de los dispositivos fabricados por LIW Care Technology Sp. z o. z oo contiene párrafos marcados con el Símbolo de ATENCIÓN, que llama especial la atención sobre su contenido. El significado del símbolo antes mencionado es el siguiente:



¡ATENCIÓN! ESTE SÍMBOLO SE UTILIZA PARA LLAMAR LA ATENCIÓN DEL LECTOR SOBRE LA CONTENIDO MARCADO CON EL SÍMBOLO. INCUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO BAJO ESTE SÍMBOLO PUEDE CONSTITUIR UN PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DEL USUARIO.



¡ATENCIÓN! EL COHECITO PARA NECESIDADES ESPECIALES NO ESTÁ DISEÑADO PARA SER TRANSPORTADO EN VEHICULOS A MOTOR CON PERSONA SENTADA EN EL COHECITO.



¡ATENCIÓN! EL DISPOSITIVO DEBE SER REVISADO REGULARMENTE. ESTO MAXIMIZARÁ SU VIDA UTIL.

## 2 símbolos



Nombre del fabricante



Fecha de producción



Número de serie



Peso de usuario aceptable



Sigue las instrucciones de uso.



Flechas que indican las direcciones de movimiento.



Dispositivo médico



Símbolo de cumplimiento en línea con el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre productos sanitarios, Anexo V.



No desechar con la basura doméstica

## 3 Cumplimiento de los requisitos de dispositivos médicos

El dispositivo Cohecito para Niños con Necesidades Especiales cumple con el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2017 sobre productos sanitarios.

El dispositivo Cohecito para niños con necesidades especiales, basado en el Anexo VIII del Reglamento (UE) 2017/745 de la Unión Europea Parlamento y del Consejo de 5 de abril de 2017 sobre productos sanitarios, es un producto sanitario activo, no invasivo, de clase I según la regla 1.

La declaración de conformidad del dispositivo está disponible en el departamento comercial del fabricante.



¡ATENCIÓN! EN CASO DE MODIFICAR EL DISPOSITIVO, UTILIZAR REPUESTOS NO ORIGINALES O UTILIZAR EL DISPOSITIVO CON PRODUCTOS DE DIFERENTE FABRICANTE, SE DEBE QUITAR EL MARCADO CE.

## 4 Indicaciones de uso del dispositivo.

El cochecito HIRO BUGGY para niños con necesidades especiales está dedicado a niños que no miden más de 130 cm de altura. El cochecito se puede utilizar en personas con mala postura, disfunción muscular o trastornos del equilibrio. Resulta excelente en niños con parálisis cerebral, distrofia muscular, en parálisis de diversas etiologías, tetraplejías y paraplejías, así como en niños con mala postura.

El dispositivo estabiliza el cuerpo en una posición óptima. Gracias al respaldo regulable con soportes laterales, se puede adaptar perfectamente a la posición y altura del niño. El uso del dispositivo debe consultarse con un médico o fisioterapeuta.

### 5 Especificaciones técnicas

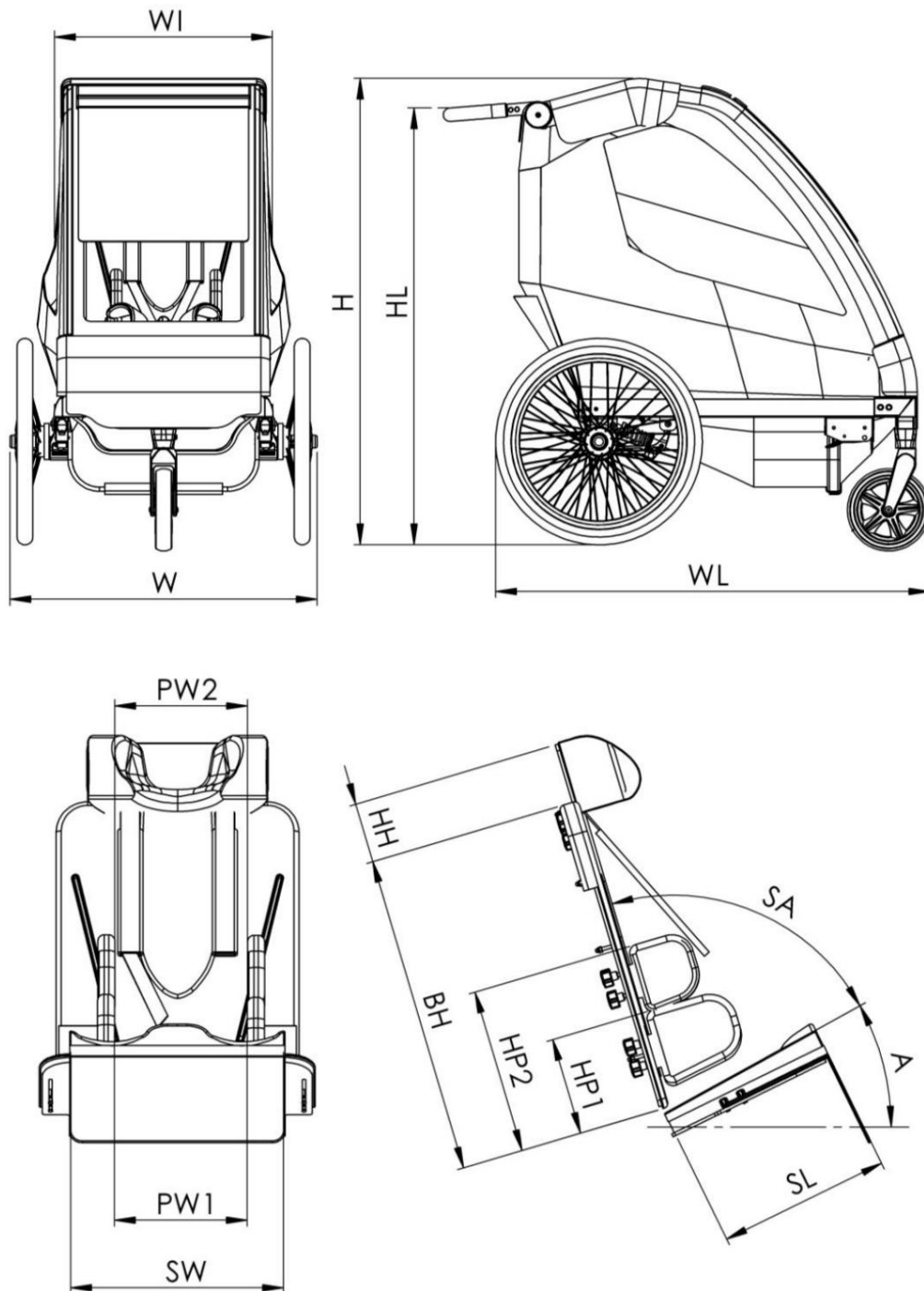


Figura 1

No.	Parámetro	Unidad	Símbolos	Valor
1	Longitud del asiento	cm	SL	20+27
2	Ancho del asiento	cm	SW	33,5
3	Ángulo	°	A	6/12/18/22/28
4	Ángulo del asiento	°	SA	A=6 (112/118/125) A=12 (106/112/119) A=18 (100/106/113)



				A=22 (96/102/109) A=28 (90/96/103)
5	Altura del respaldo	cm	bh	55
6	Altura del reposacabezas	cm	S.S	10
7	Altura del soporte del pecho	cm	HP2	27+40
8	Ancho del soporte del pecho	cm	PW2	13,5+30
9	Altura del soporte de cadera	cm	HP2	16+27
10	Ancho del soporte de cadera	cm	PW2	13,5+30
11	Altura del suelo al mango	cm	HL	86+115
12	ancho	cm	S	67,5
13	Ancho interior	cm	W1	52
14	Altura	cm	h	110
15	Peso máximo del paciente	kg		30
16	Carga máxima	kg		35
17	Peso sin carga	kg		20

### 6 HIRO BUGGY Cohecito para necesidades especiales diseño general

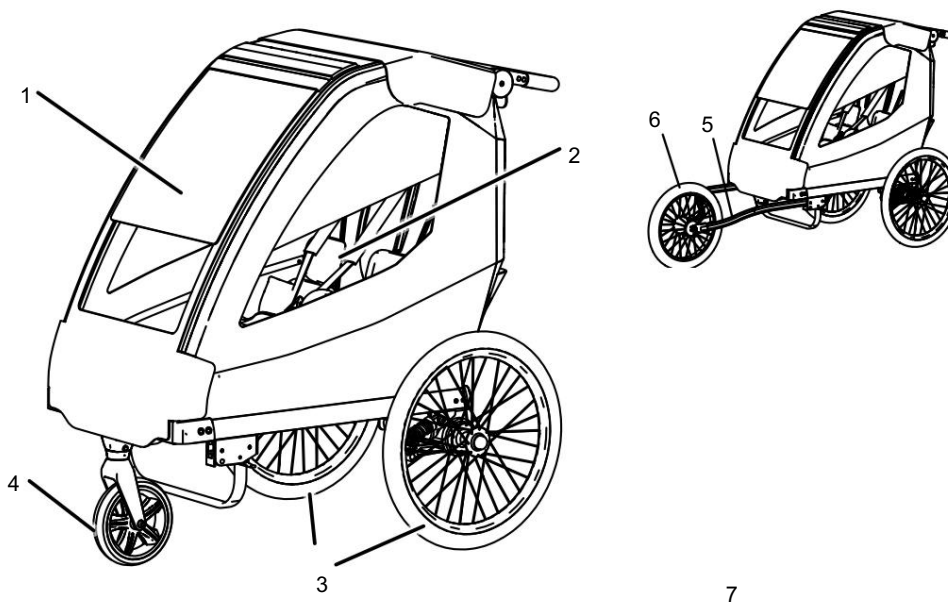


Figura 2

1. Cabina de cochecito para necesidades especiales HIRO BUGGY
2. Asiento ajustable
3. Rueda de 20"
4. Rueda delantera de 8"
5. Soporte para rueda de 16"
6. Rueda de 16"



6.1 Componentes del asiento del cochecito para necesidades especiales HIRO BUGGY

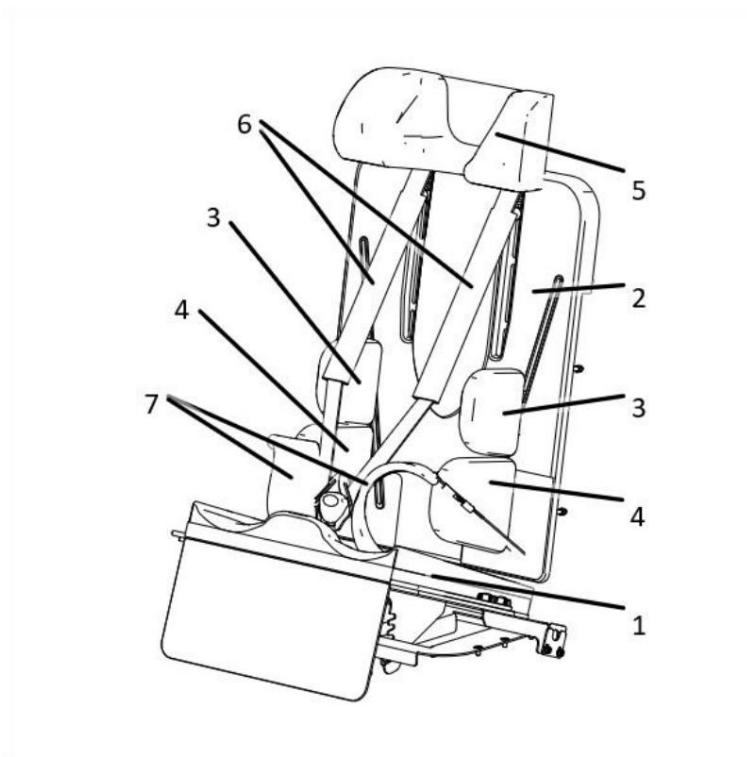


Fig. 3

1. Asiento con ángulo y longitud ajustables
2. Respaldo con ángulo de inclinación ajustable
3. Soportes para el pecho
4. Soportes para las caderas
5. Reposacabezas
6. Correas
7. Cinturones de cadera

6.2 Componentes del armazón del cochecito para necesidades especiales HIRO BUGGY

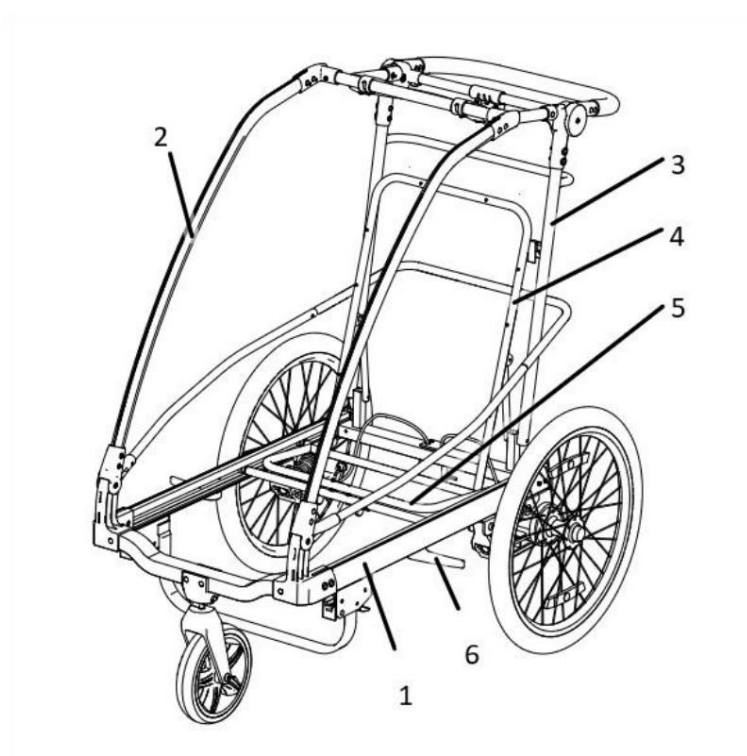


Figura 4

1. Marco principal
2. Marco frontal
3. Estructura con asa de empuje
4. Estructura del respaldo
5. Estructura del asiento
6. Guardias de seguridad



### 6.3 Encendiendo

El cochecito para necesidades especiales HIRO BUGGY está equipado con reflectores rojos (1) ubicados al nivel del eje de la rueda trasera. Al frente En parte del cochecito se encuentran unos reflectores blancos (3). Además, hay reflectores naranjas montados en las ruedas (4).

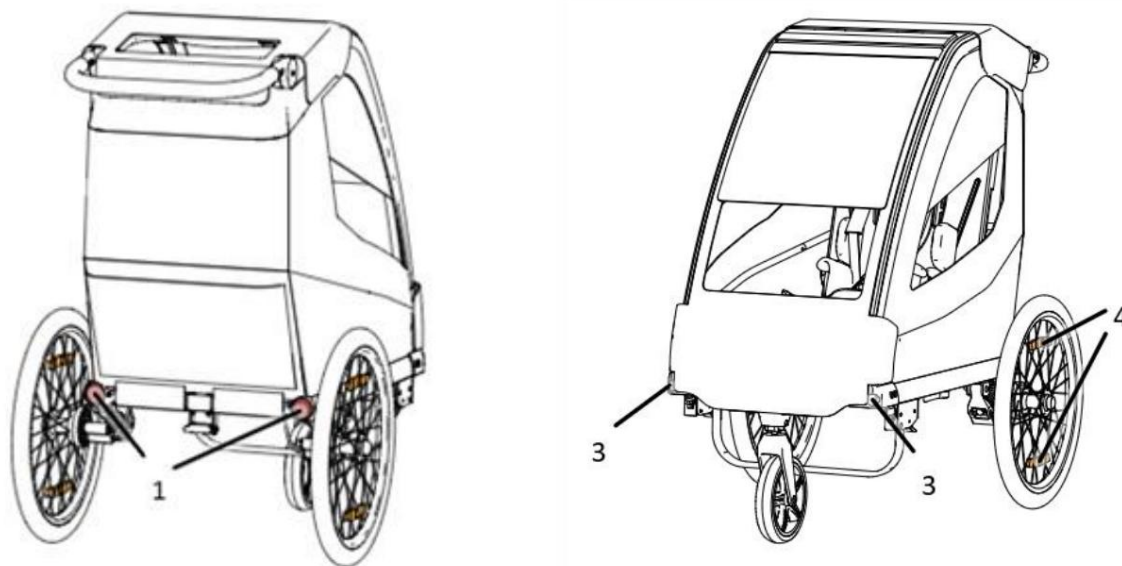


figura 5

## 7 Instrucciones de plegado y ajuste

### 7.1 Plegado del cochecito

Antes de comenzar a plegar el cochecito, primero retire la rueda motriz del marco y cualquier accesorio adicional adjunto a el marco. Para quitar las ruedas traseras (1), presione el botón (2) ubicado en el cubo de la rueda y retire la rueda del cuadro.

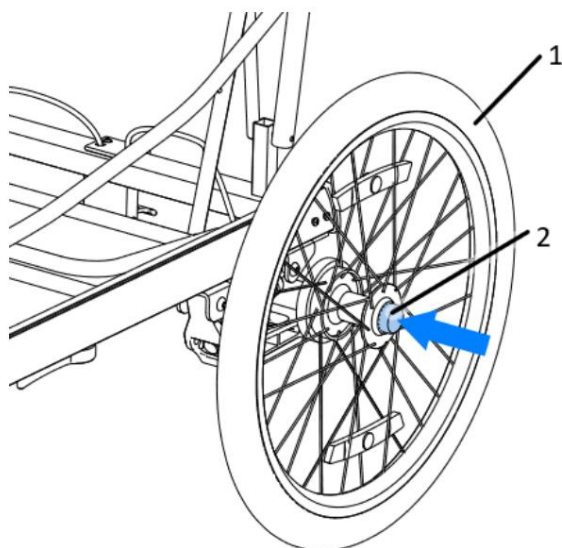


Figura 6

La rueda delantera (1) del cochecito se retira presionando el botón (2) en el costado del soporte de la rueda y luego tirando del rueda hacia abajo.

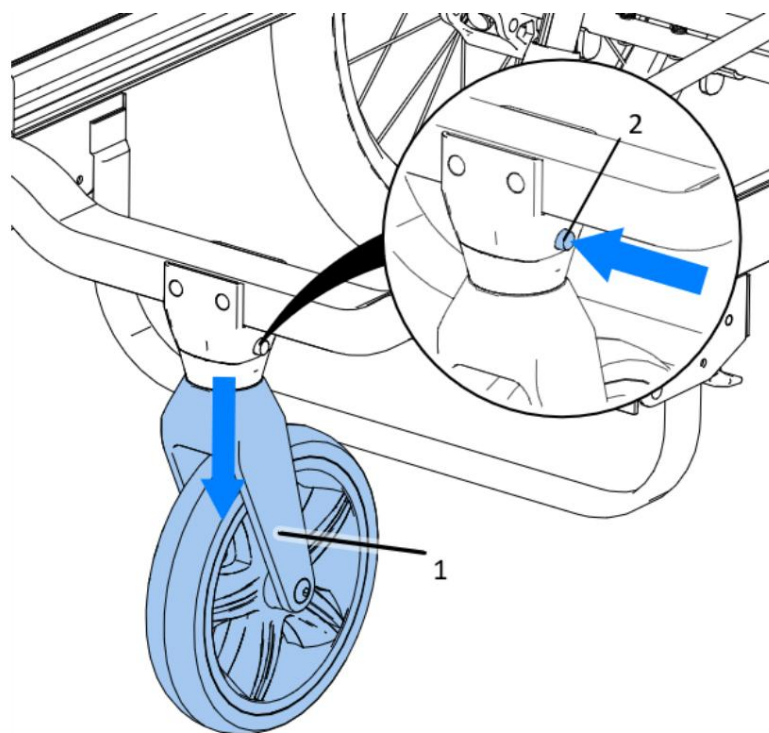


figura 7

Luego, puedes empezar a plegar el cochecito. Retire la tapicería (1) donde se indica en la imagen, desbloquee los pestillos (2) que conectan el marco frontal con el marco del mango y liberen el bloqueo de ajuste de la posición del mango (3).

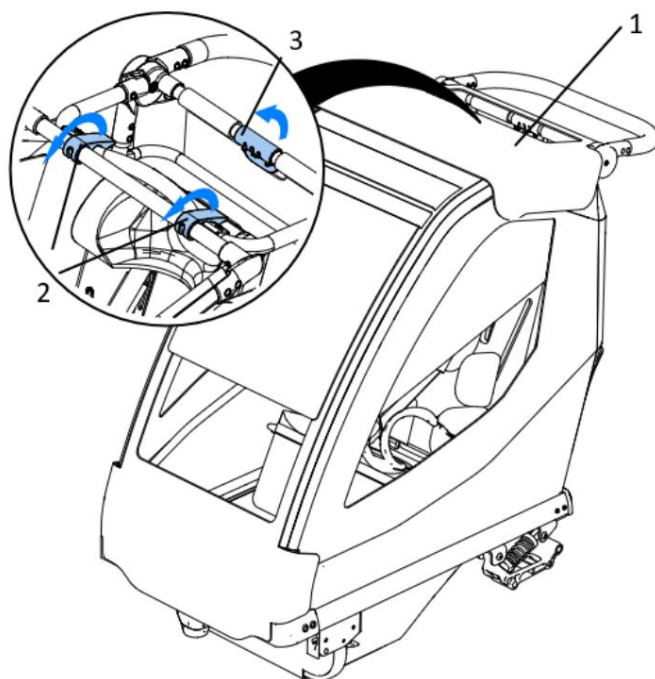


Figura 8

Ahora, desbloquee el asiento (1) moviendo el bloqueo hacia (2) y mueva el asiento a la posición más delantera. Deje el asiento suelto para un mayor plegado.

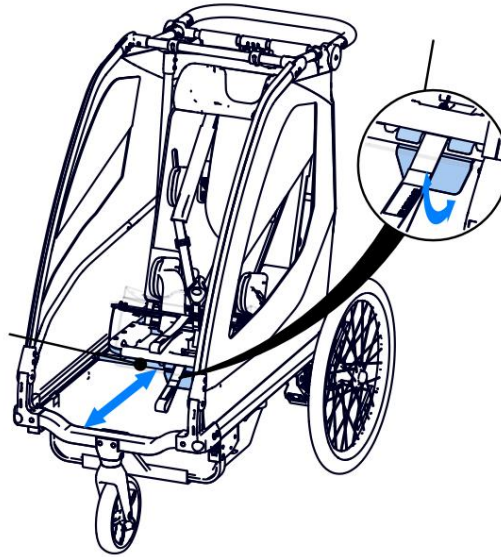


Figura 9

Baje el mango (1) para que no interfiera con la operación de plegado, levante ligeramente el marco frontal (2) para que quede Es posible plegar el marco (3), con el asa hacia adelante, debajo de la barra del marco frontal (2).

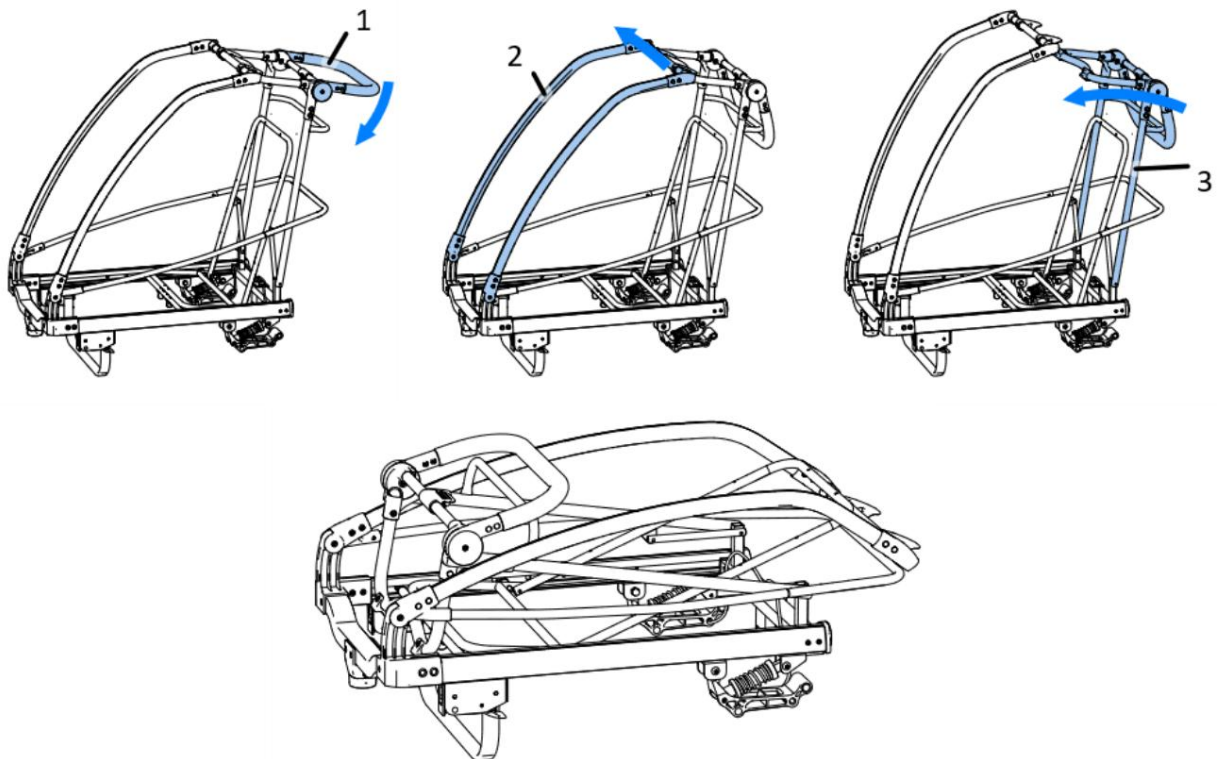


Figura 10



¡ATENCIÓN! Al plegar el marco, preste especial atención a los posibles puntos de pellizco creados por los elementos móviles.

### 7.2 Bloqueo de la rueda trasera – freno de estacionamiento

El cochecito para necesidades especiales HIRO BUGGY está equipado con un freno de estacionamiento que bloquea la rueda derecha e izquierda simultáneamente. Al presionar el pedal del freno (1) se bloquean los pasadores del freno en las aberturas de los rosetones de las ruedas (2). El freno se libera moviendo el pedal del freno (1) hacia arriba.

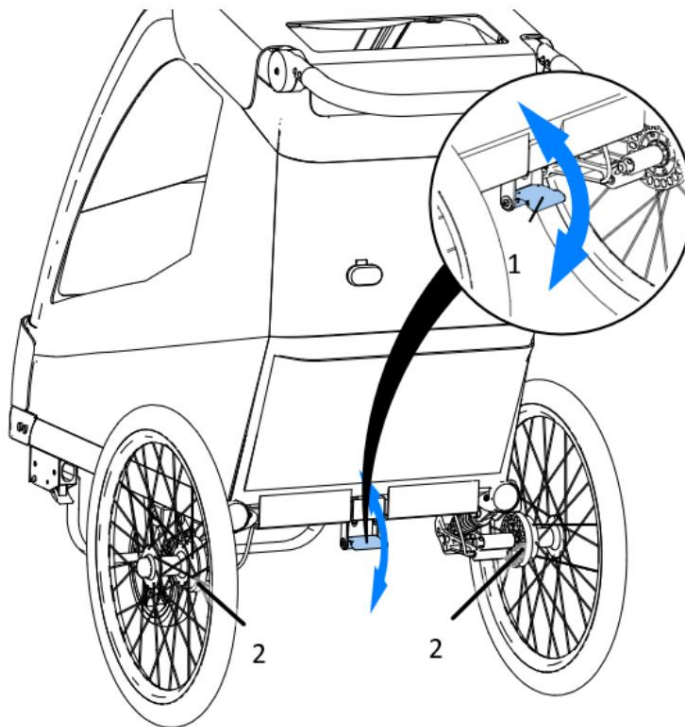


Figura 11



¡ATENCIÓN! Es necesario comprobar periódicamente el estado de los frenos y eliminar la suciedad y el barro acumulados.

### 7.3 Ajuste del mango de empuje

El mango de empuje (1) se regula mediante una palanca (2) situada debajo de la parte trasera del tapizado superior. Para cambiar el posición del tirador, soltar esta parte del tapizado y tirar de la palanca (2). Esto desbloqueará la manija (1) y ahora podrá ajustar su posición. Después de elegir la posición correcta del mango, empuje la palanca (2) hacia abajo para bloquear el mango.

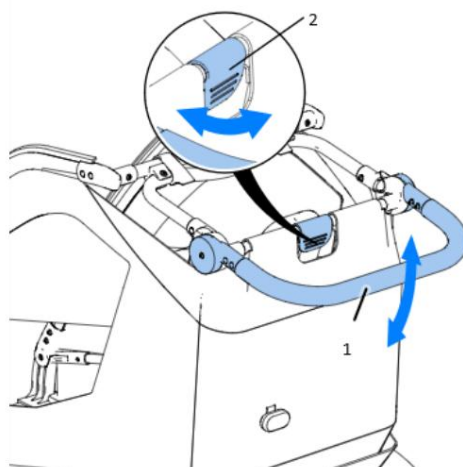


Figura 12

## 7.4 Ajuste del asiento

Para ajustar la longitud del asiento (1), afloje las tuercas (2) ubicadas a los lados del asiento con una llave de 8 mm. Luego, mueva la tapicería junto con la base de plástico a lo largo de las ranuras guía hasta lograr la posición deseada. Luego apretar las tuercas (2).

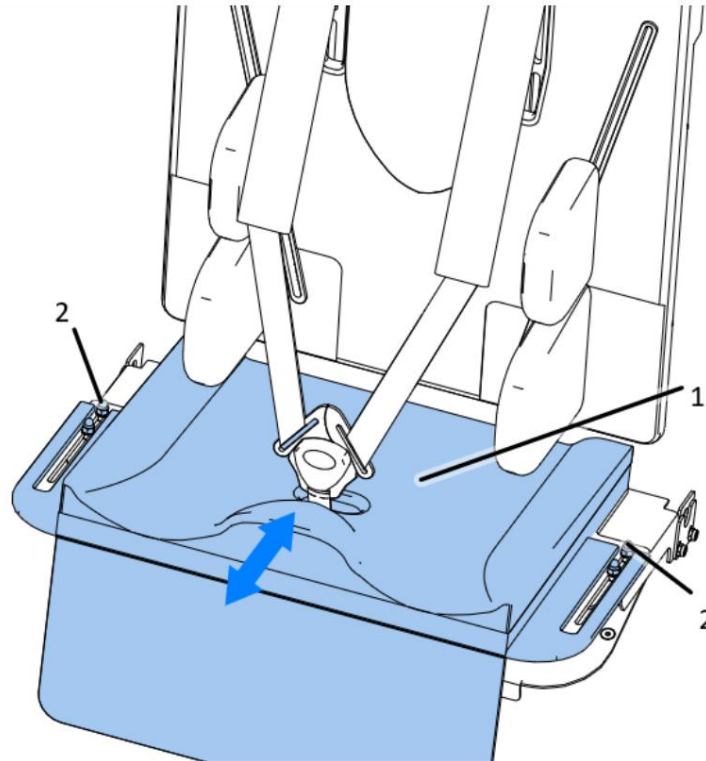


Figura 13

El asiento se puede inclinar en cinco posiciones angulares. Para inclinar el asiento (1) a una posición deseada, levante la franja gris (2) "Tilt Lift" ubicada debajo de la parte delantera del asiento (Fig. 14). Cada posición se bloqueará automáticamente. Para bajar el asiento, suelte el bloqueo tirando de la franja azul (3) "Tilt Release" y por la franja gris baje el asiento. Después de soltar la franja azul, el asiento se bloqueará en la posición más cercana.

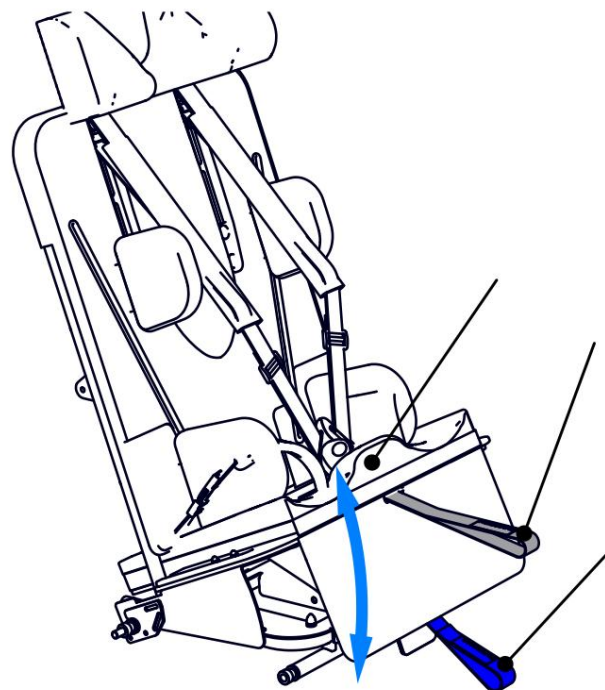


Figura 14





¡ATENCIÓN! Al ajustar el asiento, preste especial atención a los posibles puntos de pellizco creados por los elementos móviles.

### 7.5 Ajuste del ángulo del respaldo

El respaldo (1) se puede ajustar en tres posiciones moviendo el asiento (3) hacia adelante o hacia atrás. La Fig. 15 muestra la posición del asiento y el ajuste del ángulo del respaldo. Mueva las cerraduras (2) hacia y mueva el asiento (3) a una de las tres posiciones disponibles. Existe la posibilidad de ajustar el respaldo en posición sentada y semi reclinada.

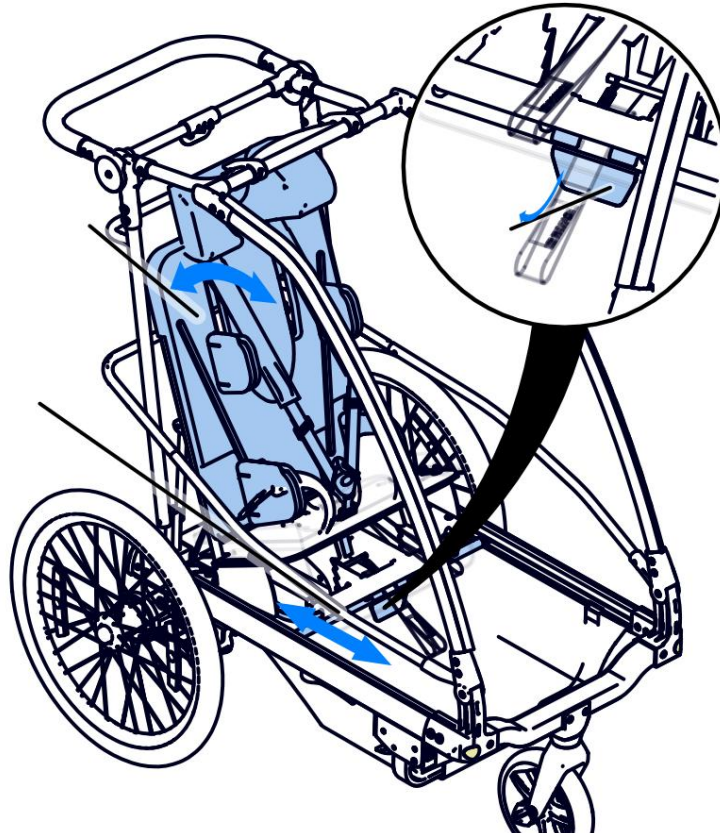


Figura 15



¡ATENCIÓN! Al ajustar el respaldo, preste especial atención a los posibles puntos de pellizco creados por los elementos móviles.



¡ATENCIÓN! Se recomienda ajustar el ángulo del respaldo cuando el asiento está descargado. Según las regulaciones, asegúrese de que los pasadores estén bloqueados en ambos lados del asiento.

### 7.6 Preparación para ajustar los elementos de soporte

Para facilitar el ajuste del respaldo en la tapicería, se hizo especialmente una solapa con cremallera en la parte trasera de la cabina del cochecito. Figura 16.



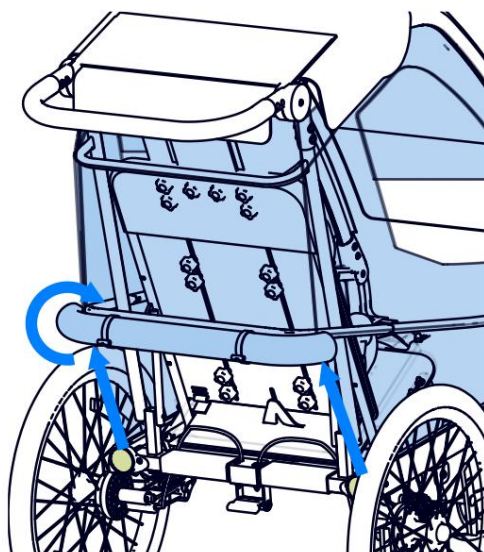


Figura 16

Después de abrir los laterales, existe la posibilidad de enrollar y separar la tapicería por encima de las cremalleras y fijarla con bandas elásticas. patas.

### 7.7 Ajuste del cierre de la correa superior

La silla de paseo está equipada con correas de tres puntos (1) que permiten sujetar adecuadamente al niño. Las correas ofrecen ajustable altura de los cierres superiores y longitud de la correa ajustable.

La altura de los cierres de las correas superiores se determina en función de la altura de los hombros del niño. Los cierres deben situarse ligeramente por encima de los hombros, para que al apretar las correas el niño no sea empujado hacia abajo. El ajuste se realiza aflojando los pomos (2) situados en la parte trasera del respaldo. Después de colocar los sujetadores a la altura deseada, apriete las perillas (2).

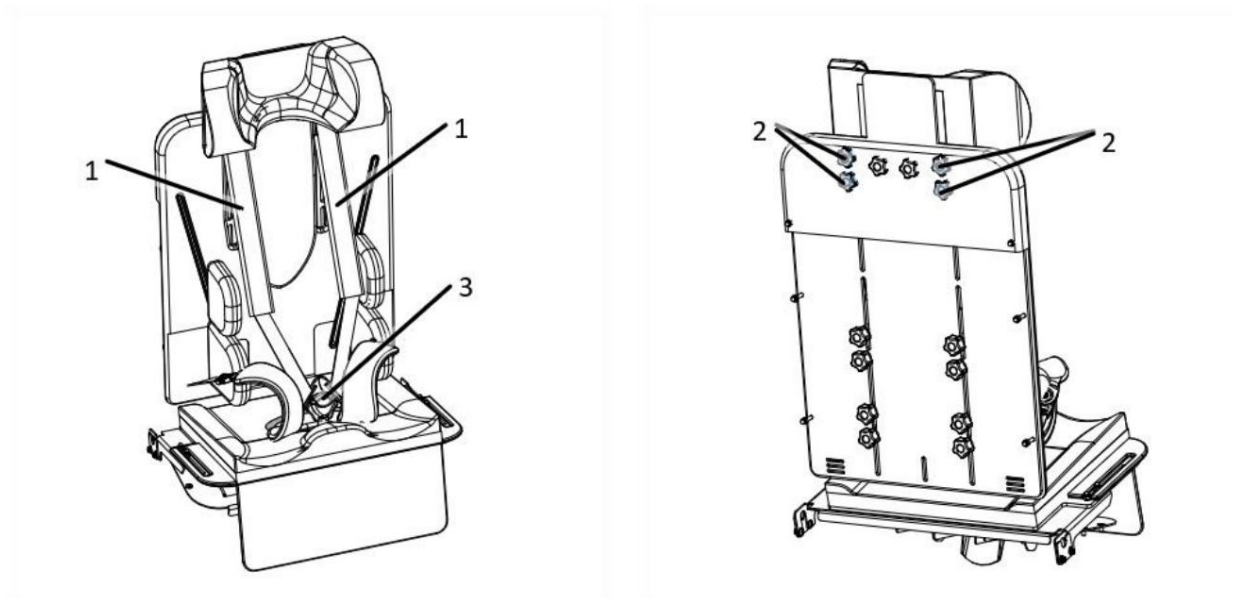


Figura 17

Las correas están equipadas con ojales de plástico para ajustar la longitud de la correa. Su posición debe adaptarse a la postura corporal del niño. Para cambiar la ubicación de la hebilla de la correa (3), reajuste la correa fijada en la parte plástica del asiento debajo de la tapicería.



## 7.8 Ajuste de la suspensión

La silla de paseo permite ajustar la dureza de la suspensión de las ruedas traseras. Entre el bastidor y la suspensión de la rueda trasera, hay amortiguadores ajustables (1). Girando la tuerca (2) del amortiguador se puede aumentar o disminuir la dureza de la suspensión. La tuerca es dentada, lo que facilita el ajuste manual. Cambiar la configuración del amortiguador no requiere ninguna herramienta.

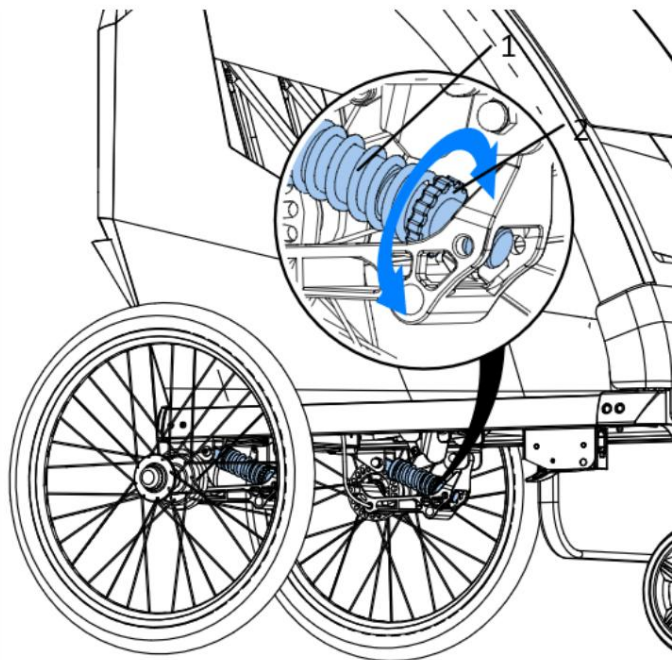


Figura 18

## 7.9 Montaje de parasoles y tapizados delanteros

El cochecito para necesidades especiales HIRO BUGGY está equipado con parasoles de tela negra que permiten restringir el acceso de la luz a la persona sentada en el cochecito. La parte delantera de las sombrillas se fija desde el exterior mediante cierres adhesivos. Se puede plegar y esconder en el bolsillo situado en la parte superior de la tapicería delantera. Este elemento no se puede quitar por completo, sino sólo plegarlo hacia arriba. Las cubiertas laterales se colocan desde el interior. Están plegados hacia arriba y también se sujetan con cierres autoadherentes.

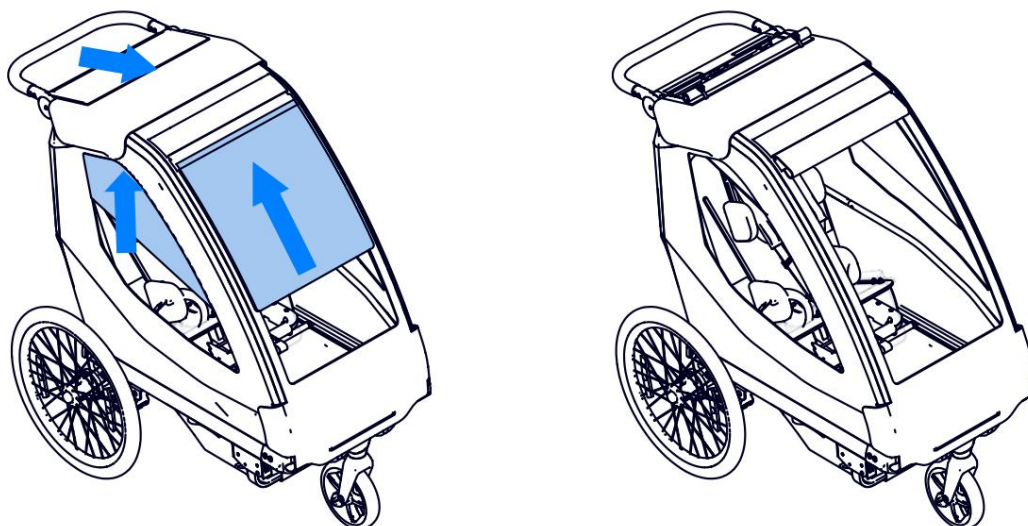


Figura 19

El tapizado delantero se fija en la parte inferior con cierres adhesivos y en el centro con un imán. De  
En la parte delantera, a lo largo de todo el largo de los laterales, el tapizado se cierra con cremallera. Una vez desabrochado, el tapizado se puede plegar y colocar hacia  
arriba en el bolsillo especial situado en la parte superior del tapizado.

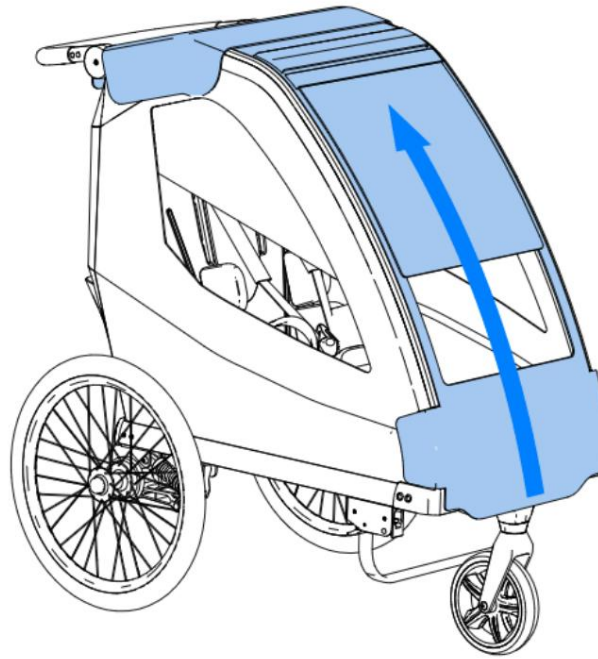


figura 20

## 8 accesorios

### 8.1 Soportes para el pecho

Los soportes para el pecho (1) garantizan la correcta posición y estabilización del tronco del niño. Los soportes también se pueden utilizar para mejorar la postura corporal. El ajuste de altura y anchura de los soportes para el pecho es posible después de aflojar las perillas ubicadas en la parte posterior del respaldo. Después de instalar los soportes para el pecho, apriete las perillas.

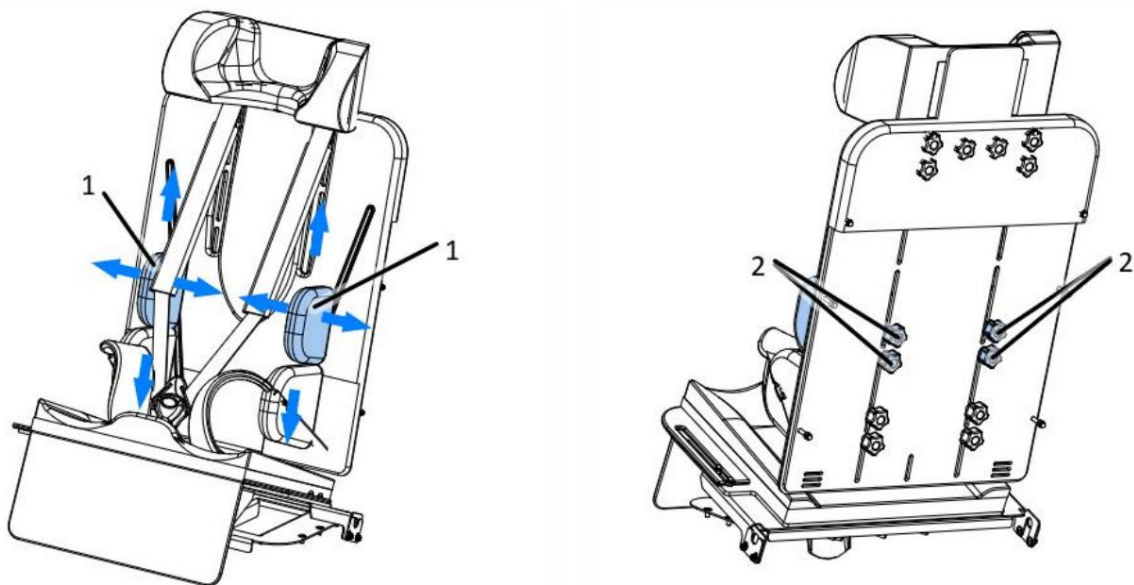


Figura 21

### 8.2 Soportes para la cadera

Los soportes para las caderas (1) garantizan la posición correcta y la estabilización de la pelvis y las caderas del niño. Los soportes también se pueden utilizar para mejorar la postura corporal. El ajuste de altura y anchura de los soportes de cadera es posible después de aflojar los pomos (2) situados en la parte inferior de la espalda del respaldo. Después de instalar los soportes para la cadera, apriete las perillas.

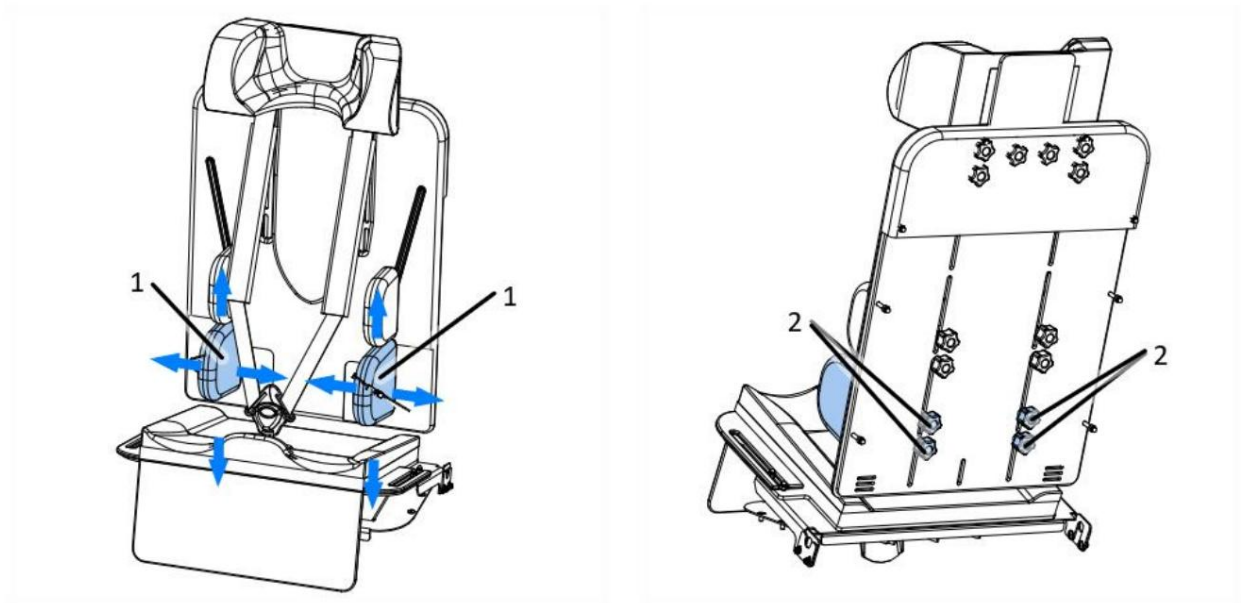


Figura 22

### 8.3 Cinturón estabilizador

El cinturón estabilizador (1) está diseñado para estabilizar la pelvis y las caderas. La longitud del cinturón se ajusta directamente mediante las hebillas de fijación (2).

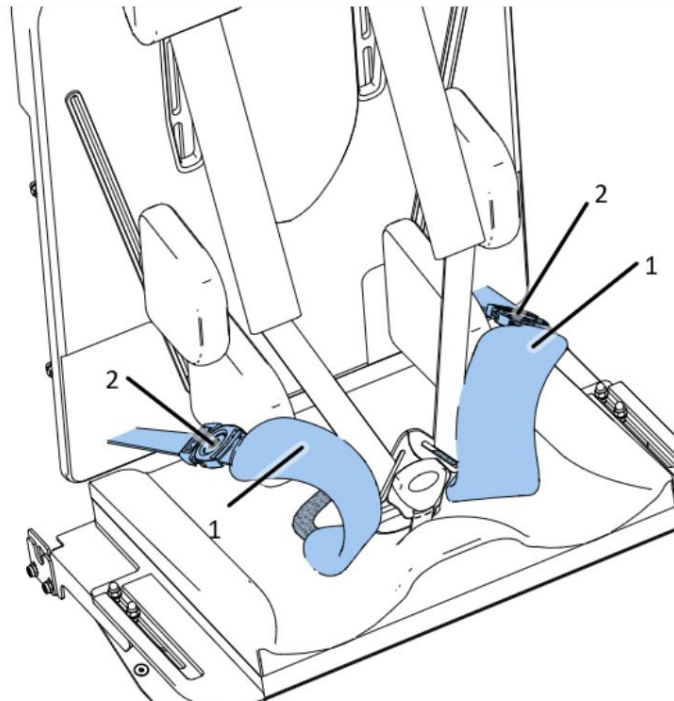


Figura 23

#### 8.4 Podnózek

El reposapiés está destinado a apoyar los pies durante la marcha. Para ajustar el reposapiés es necesario desatornillar las tuercas de mariposa de los pernos de carro (2) y mover el reposapiés (1) a una posición que permita que los pies descansen cómodamente. *Uwaga! Nie można odnaleźć źródła odwołania.* Después de lograr una posición satisfactoria, fije las tuercas de mariposa para bloquear el reposapiés.

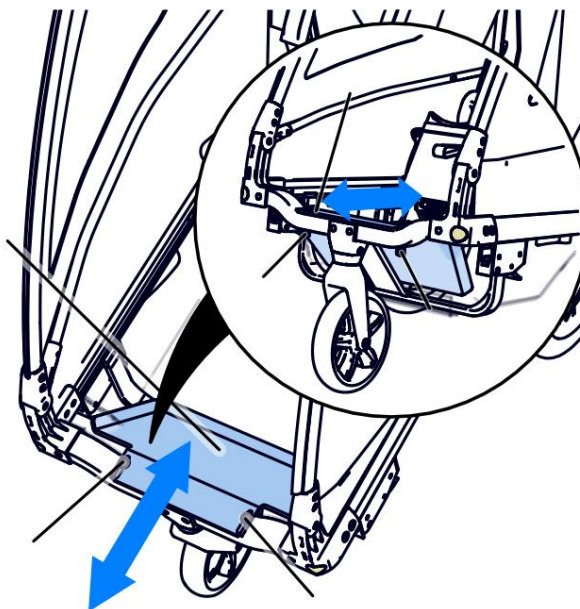


Figura 24

#### 8.5 Reposacabezas

El reposacabezas (1) es el encargado de sostener la cabeza del niño cuando éste no puede mantenerla en la posición correcta. El reposacabezas se puede fijar mediante un cierre de velcro en el tapizado del respaldo o, si es necesario, encima del respaldo. Para montar el reposacabezas encima del respaldo, desabroche la cremallera situada en la parte media superior del tapizado del respaldo, dejando una ranura de aproximadamente 15 cm. Luego, suelte las perillas (2) ubicadas en la parte posterior del respaldo y, sujetando las perillas (2), deslice hacia afuera el soporte del reposacabezas (3), al que se debe montar el reposacabezas. Después de configurar la posición del reposacabezas, apriete el pomo (2).

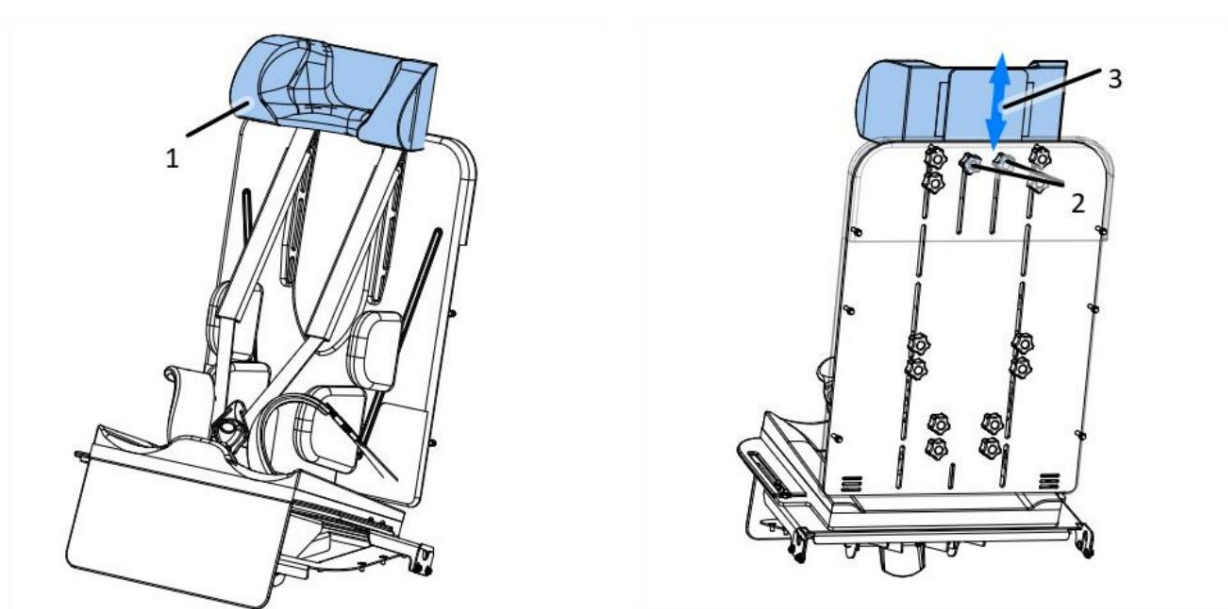


Figura 25



## 8.6 Rueda delantera de 16"

La rueda delantera de 16" es un accesorio especialmente recomendado cuando se utiliza la silla de paseo durante paseos por terreno irregular. Una vez instalada la rueda delantera grande, también podrá utilizar el cochecito cuando, por ejemplo, haga jogging. Para montar la rueda grande, deslice las barras guía (1) de la rueda de 16" en los seguros (2) ubicados al costado del marco, luego inserte los pasadores (3) y enganche la palanca de bloqueo (4). Posteriormente montar la rueda de 16" (5) en los yugos (6) y bloquear el eje de la rueda con la palanca (7).

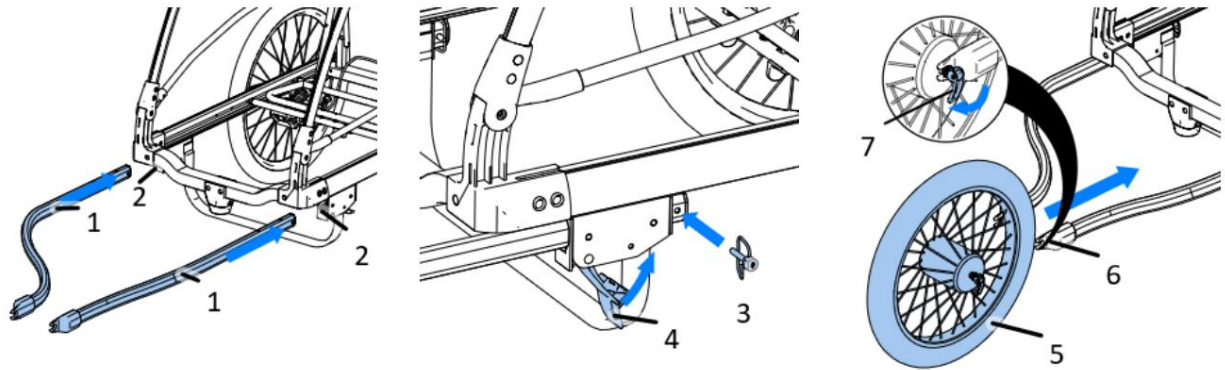


Figura 26



¡ATENCIÓN! Después de montar la rueda, asegúrese de que todos los elementos estén correctamente asegurados.

## 9 Limpieza y mantenimiento

Para mantener el dispositivo en buen estado de funcionamiento, limpie periódicamente la silla de paseo y sus accesorios y controle el componentes mecánicos para detectar conexiones flojas y desgaste de piezas de desgaste.

Antes de cada uso, verifique la presión de los neumáticos y verifique que los neumáticos no estén dañados (desgarros, cortes, desgaste) y asegúrese de que la rueda trasera La cerradura está en buen estado de funcionamiento.

Limpia el cochecito con regularidad. Si la silla de paseo se utiliza en condiciones climáticas adversas y en un terreno desfavorable (barro, nieve, sal o arena), es necesario limpiar el cochecito después de cada uso.

- Quitar periódicamente la suciedad y el barro del bastidor y de las partes móviles de los mecanismos.
- Las capas de pintura del marco y de los elementos plásticos se limpian con un paño humedecido con agua. Usando suave Los agentes de limpieza son aceptables.
- Para la limpieza, no utilice productos químicos agresivos ni chorros de agua fuertes porque tales medidas podrían dañar la capa de pintura y exponer los componentes a un desgaste más rápido.
- Evite la exposición prolongada a la luz solar y compruebe siempre la temperatura del asiento antes de usarlo.

Limpieza de los accesorios con elementos tapizados:

- No lave a máquina los elementos tapizados.
- Para la limpieza no utilice productos químicos agresivos ni chorros de agua fuertes.



¡ATENCIÓN! Antes de volver a utilizar el dispositivo, la tapicería debe estar seca.



¡ATENCIÓN! El mantenimiento del cochecito debe realizarse al menos una vez al año (cada 12 meses) por parte de un técnico calificado. Durante el mantenimiento, realice una verificación de seguridad de la silla de paseo, que incluya el estado de los puntos de fijación móviles, mecanismos de sujeción y ajustes. El mantenimiento periódico del dispositivo garantiza un funcionamiento prolongado y sin problemas.

## 10 Almacenamiento y transporte

¡NOTA!

El dispositivo se puede almacenar/transportar y utilizar entre  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  y  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$  y entre 10 % y 90 % de humedad relativa; sin embargo, se recomienda almacenar/transportar el dispositivo a temperatura y humedad ambiente.



Si el dispositivo ha sido almacenado/transportado a una temperatura ambiente alta y ha estado expuesto a la luz solar directa, asegúrese de que tenga una temperatura de uso segura, es decir, el tutor debe verificar si la temperatura del dispositivo no es demasiado alta antes de que el usuario tenga cualquier contacto con el dispositivo.

## 11 Manejo del dispositivo

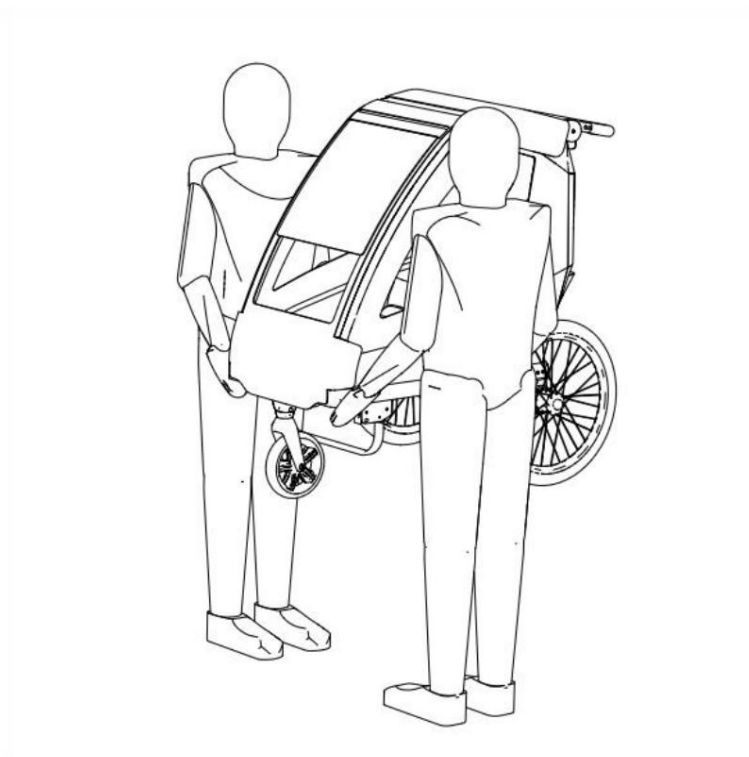


Figura 27

El cochecito para necesidades especiales HIRO BUGGY debe ser manejado con las dos manos por dos personas. Levante el dispositivo por el marco fijo. elementos. El manejo adecuado del dispositivo se muestra en la Fig. 27.



¡ATENCIÓN! Bajo ninguna circunstancia debes transportar el dispositivo cuando esté ocupado.

## 12 Placa de identificación del cochecito para niños con necesidades especiales

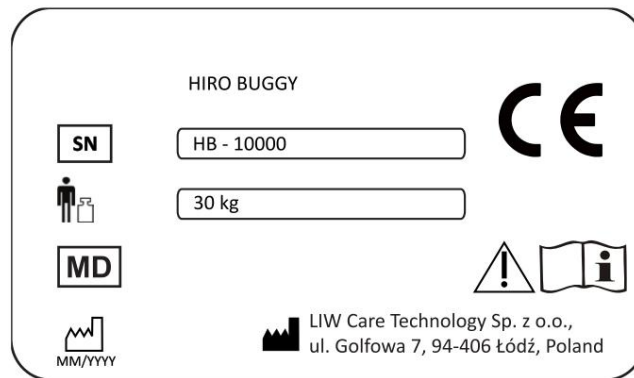


Figura 28

La placa de identificación está fijada al marco. La placa de identificación contiene información sobre el fabricante, nombre del producto, número de serie, número, peso máximo del paciente y otras anotaciones.

## 13 Garantía/servicio

Si nota algún defecto o daño, deje de usar el dispositivo inmediatamente y comuníquese con el vendedor o el fabricante. Un dispositivo dañado debe protegerse contra daños mayores en el área afectada. No intente reparar el dispositivo usted mismo. No sustituya las piezas originales del dispositivo por piezas caseras o obtenidas de una fuente diferente a la recomendada por el fabricante.

- Si el usuario deja de utilizar el dispositivo, deberá eliminarlo de acuerdo con las normas medioambientales.
- Según el fabricante la vida útil del dispositivo es de 5 años.
- El servicio posgarantía lo realiza el fabricante.

### Datos de contacto del servicio:

LIW Care Tecnología Sp. z o.o. z oo, ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź.

[www.liwcare.pl](http://www.liwcare.pl)

Tel.: 42 212 35 18 Correo electrónico: [reklamacje@liwcare.pl](mailto:reklamacje@liwcare.pl)

- Los datos de dirección actualizados están disponibles en [www.liwcare.pl](http://www.liwcare.pl).
- Los términos y condiciones de la garantía se especifican en la tarjeta de garantía que forma parte integral de estas instrucciones.

La tarjeta de garantía se encuentra en la última página de estas instrucciones.



## TARJETA DE GARANTÍA

## Términos y condiciones de garantía:

1. LIW Care Tecnología Sp. z o.o. z oo, fabricante de aparatos de rehabilitación (ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź), garantiza que el aparato adquirido por el consumidor u otro usuario se encuentra en buen estado de funcionamiento, libre de defectos de diseño, montaje y materiales, así como que el dispositivo permanecerá libre de estos defectos durante el período de garantía. La garantía no cubre la utilidad del producto para las necesidades del comprador.
2. LIW Care Tecnología Sp. z o.o. z oo ofrece una garantía de dos años para sus productos. El período de garantía se extiende desde la fecha de emisión del producto hasta el consumidor.
3. La única prueba de garantía es esta tarjeta de garantía emitida por el vendedor al comprador junto con el comprobante de compra (factura o recibo). Una transferencia de derechos bajo la garantía requiere una transferencia de derechos de propiedad a la tarjeta de garantía y el comprobante de compra.
4. Si durante el período de garantía se descubre que el equipo está defectuoso o dañado, el defecto o daño se eliminará sin cargo reparando o reemplazando el equipo. Si sólo es necesario sustituir una parte del producto, la pieza dañada pasa a ser propiedad de LIW Care Technology Sp. z o. z oo y no será devuelto al beneficiario de la garantía.
5. El beneficiario de la garantía deberá informar un defecto físico en la mercancía encontrado durante el período de garantía mediante un Formulario de Reclamación. Un archivo con el formulario de queja está disponible en [www.liwcare.pl](http://www.liwcare.pl) en la sección "Productos". Este formulario también se puede obtener de cada uno de nuestros especialistas de ventas regionales, cuyos datos de contacto se pueden encontrar en nuestro sitio web [www.liwcare.pl/kontakt](http://www.liwcare.pl/kontakt).  
En caso de problemas para encontrar la Hoja de Reclamaciones, póngase en contacto con nosotros llamando al teléfono 42 212 35 18.
6. El beneficiario de la garantía deberá cumplimentar y enviar el formulario de reclamación a la Tienda donde haya adquirido el equipo o directamente al Fabricante.  
a [reklamacja@liwcare.pl](mailto:reklamacja@liwcare.pl)
7. Con base en el formulario de queja recibido vía correo electrónico, el Vendedor decide cómo será reparado el equipo. El Vendedor puede:
  - a. Solicite una reparación en casa del beneficiario de la garantía; en tal caso, la fecha de reparación del equipo se acuerda con el beneficiario por correo electrónico o por teléfono.
  - b. Exigir que el equipo se envíe al Fabricante para su reparación; en tal caso, el beneficiario de la garantía deberá entregar el equipo a la tienda médica donde compró el equipo o al Fabricante junto con el comprobante de compra y un formulario de queja completo. Los productos defectuosos se enviarán al Vendedor una vez acordada con el Vendedor la fecha de recogida de los productos por un servicio de mensajería. Los gastos de envío corren a cargo del Fabricante.
8. La garantía no cubre:
  - a. elementos desgastados o piezas que fueron destruidas o dañadas como resultado de un mal uso (especialmente incluyendo, entre otros, el uso que viola las instrucciones de uso o el uso en condiciones inadecuadas) o almacenamiento incorrecto;
  - b. daños causados por alteraciones, regulaciones, ajustes y cambios de diseño realizados por el usuario del producto o un tercero;
  - c. daños causados por limpieza o mantenimiento incorrecto realizado por el usuario del producto o un tercero;
  - d. daños causados por el desgaste normal o el envejecimiento normal del producto;
  - mi. Daños causados por negligencia por parte del usuario del producto (especialmente incluyendo, entre otros, negligencia en el mantenimiento del producto y limpieza);
  - F. Daños asociados a factores externos (daños mecánicos, contaminación, incluidas inundaciones).
9. La garantía y sus términos y condiciones son efectivos únicamente dentro de la República de Polonia.
10. La garantía no cubre regulaciones y ajustes realizados durante el período de garantía porque no son defectos del producto.
11. Un requisito previo para ejercer la garantía es entregar el producto al almacén médico donde se adquirió el equipo o al Fabricante en un forma que lo proteja contra daños.
12. La reparación o sustitución en garantía deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de entrega del equipo al Fabricante.
13. Después de la reparación en garantía, el equipo será entregado a costo del Fabricante en la dirección indicada por el beneficiario de la garantía o en el almacén médico donde fue adquirido. Si el producto reparado no es recogido por el beneficiario de la garantía, éste correrá con todos los costes relacionados incurridos por LIW Care Technology Sp. z o. z oo, incluido el coste de almacenamiento y transporte del producto.
14. La concesión de la garantía del producto por parte de LIW Care Technology Sp. z o. z oo no afecta a los derechos del comprador en virtud de la garantía legal que cubre los defectos de bienes adquiridos.

¡IMPORTANTE!

GUARDE ESTA TARJETA DE GARANTÍA EN UN LUGAR SEGURO.

Tecnología de cuidado Liw Sp. z o.o. z oo requiere que este documento se entregue antes de aceptar una reparación en garantía.

Nombre/modelo del equipo: .....

Número de fábrica: .....

Fecha de venta: .....

Sello y firma del vendedor: .....

No.	Fecha del informe de reparación	Descripción de actividades	Fecha de finalización de la reparación	Sello y firma del reparador.
1				
2				
3				
4				